

Predigraft v.1.14

Manuel utilisateur Professionnel de santé



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice d'instruction avant toute utilisation du logiciel Predigraft, dispositif médical de classe IIa.

Référence du document : TF-FORM-012

Édition Septembre 2021

Version française

Date d'obtention du marquage CE : 21 juin 2021



Fabricant :



Cibiltech
130 rue de Lourmel

75015 PARIS

Tel : [09 75 38 12 61](tel:0975381261)

E-mail : contact@cibiltech.com

Web page : www.cibiltech.com

Ce manuel est conforme au **règlement (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux.

Copyright © 2021 Cibiltech

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de Cibiltech

Table des matières

1.	À propos de ce manuel	6
2.	Information de sécurité	6
2.1.	Principaux risques liés à l'utilisation de Predigraft	6
2.2.	Avertissements	6
2.3.	Description de l'étiquetage produit	7
3.	Indication d'utilisation	7
3.1.	Utilisateurs prévus	8
3.2.	Population cible de patient	8
3.3.	Contre-indication	8
4.	Principe de fonctionnement et mode d'action	8
4.1.	La technologie iBox	8
4.2.	Mode d'action	9
5.	Caractéristiques techniques/prérequis	9
6.	Authentification/Création de compte	10
6.1.	Vous êtes propriétaire du service 	10
6.2.	Vous êtes membre du service 	10
6.3.	Vous êtes un utilisateur (propriétaire ou membre) de Predigraft 	11
7.	Gestion de services	12
7.1.	Administration du service	12
8.	Management des patients	14
8.1.	Fiche patient	14
8.1.1.	Création d'une fiche patient	14
8.1.2.	Modification d'une fiche patient	15
8.1.3.	Suppression d'une fiche patient	17
8.2.	Gestion d'un patient	17
8.2.1.	Ajout d'un patient en favoris	18
8.2.2.	Création d'un accès pour le patient	18

8.2.3.	Vous pouvez envoyer à nouveau un mail de confirmation au patient si ce dernier n'a pas reçu de mail. En cas de confirmation de mail de la part du patient, vous ne pouvez plus modifier son adresse mail. Messagerie	20
8.2.4.	Alertes	22
8.2.5.	Surveillance / Évaluation du risque	22
8.2.6.	DFG estimé	23
8.2.7.	Pression artérielle	23
8.2.8.	Poids	25
8.2.9.	Médicaments immunosuppresseurs	28
8.2.10.	Mini tableau biologique	29
8.2.11.	Tableau biologique	29
8.2.12.	Notes médicales	32
8.2.13.	Ordonnances	32
8.2.14.	Compte-rendu	34
8.2.15.	Analyses biologiques	35
8.2.16.	Biopsie	40
8.2.17.	DSA	42
8.2.18.	Autres documents	44
9.	Gestion des analyses biologiques	47
10.	Gestion des analyses biologiques de « Mes patients »	48
11.	Gestion de la liste des patients	48
11.1.	Rechercher	49
11.2	Ajouter des patients dans "Mes patients"	49
11.3	Filtre d'affichage	50
11.4	Ordonner la liste	50
11.5	Parcourir la liste	51
12.	Gestion de la liste « Mes patients »	51
12.1	Filtre d'affichage	52
12.2	Ordonner la liste	52
12.4	Parcourir la liste	53
13.	Gestion de la messagerie	54

14. Génération d'une évaluation iBox	56
14.1 Création d'une évaluation iBox	57
14.2 Visualisation des résultats	65
-	67
14.3 Génération d'iBox automatique	67
15. Gestion de la liste des évaluations iBox	67
15.1 Rechercher	68
15.2 Filtre d'affichage	68
15.3 Ordonner la liste	68
15.4 Parcourir la liste	68
16. Alertes	69
16.1 Définition des alertes	69
16.2 Paramétrage des alertes	69
16.2.1 Paramétrage de Cibiltech : paramétrage par défaut	69
16.2.2 Paramétrage au niveau du service	71
16.2.3 Historique du paramétrage au niveau du service	73
16.2.4 Paramétrage au niveau d'un patient	74
16.2.5 Historique du paramétrage au niveau du patient	75
16.3 Calcul d'alerte pour un patient	76
16.4 Gestion de la liste des patients en alerte	77
16.5 Gestion d'une alerte	78
16.6 Notification quotidienne de l'activité de vos patients	78
17. Application patient	79
18. Support/Maintenance	79
19. Données personnelles	80
20. Annexes	80
21. 20.1 Annexe 1 : Paramètres d'entrée	80
20.2 Annexe 2 : Calcul d'alertes	81
20.3 Annexe 3 : Unités de référence du tableau biologique	85

1. À propos de ce manuel

Ce manuel fait partie intégrante du logiciel Predigraft. Il détaille la présentation de l'application, son paramétrage et son utilisation.

La version électronique est accessible en ligne sur www.cibiltech.com

En cas de besoin, une version imprimée peut-être fournie sur demande à l'adresse suivante : contact@cibiltech.com

Remarque : Les copies d'écran reproduites dans ce manuel utilisateur sont ici à titre d'exemple, ne sont pas exhaustives et peuvent légèrement différer des vues disponibles dans l'interface utilisateur.

Public visé : Ce manuel est destiné aux professionnels de santé.

2. Information de sécurité

Seul le personnel de santé ayant intégralement lu cette notice est autorisé à utiliser le logiciel Predigraft. Pour une utilisation correcte et sûre et pour toutes interventions de maintenance, il est essentiel que le personnel respecte les procédures normales de sécurité.

2.1. Principaux risques liés à l'utilisation de Predigraft

Les principaux risques identifiés sont liés à l'entrée des données qui peuvent engendrer :

- **Une surestimation de l'état de santé actuel ou prévu du patient :**

Lorsqu'une donnée d'entrée est erronée (c'est-à-dire faussement rassurante) et qu'alors, une alerte n'est pas envoyée au professionnel de santé, les probabilités de survie du greffon sont plus élevées qu'attendu.

- **Une sous-estimation de l'état de santé actuel ou prévu :**

Lorsqu'une donnée d'entrée est erronée (c'est-à-dire faussement critique) et qu'alors, une alerte est envoyée au professionnel de santé, les probabilités de survie du greffon sont plus basses qu'attendu.

Attention : Predigraft est un outil d'aide à la décision. L'évaluation clinique de l'état de santé effectuée par le professionnel de santé ne repose pas uniquement sur les pronostics de Predigraft.

2.2. Avertissements

- Veillez à ouvrir des sites Web seulement via une connexion sécurisée SSL/TLS. Dans ce cas, l'adresse Internet commence par "https". Les simples connexions qui ne commencent que par "http" constituent un risque pour la sécurité.

- Veuillez à utiliser la dernière version de votre navigateur Web (compatible avec Predigraft voir *chapitre caractéristiques techniques*) et actualisez régulièrement votre système d'exploitation en effectuant les mises à jour.
- Concernant vos mots de passe, gardez-les à jour. Utilisez un mot de passe distinct pour chaque application et n'utilisez pas d'anciens mots de passe.
- Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les mails d'expéditeurs inconnus, cela pourrait vous attirer vers un site Web contenant des logiciels malveillants.

2.3. Description de l'étiquetage produit

Les symboles suivants peuvent être visible dans l'application ou dans la documentation :

Symbole/Texte	Signification
	Adresse du fabricant
Predigraft v1.14	Identification du nom et version du dispositif
 <p>Lot: 114 Production date: 210921 GTIN: 03760326530014 <small>(01)03760326530014(11)210921(10)114</small></p>	Code barre UDI
	Consulter le manuel d'utilisation
CE ₂₇₉₇	Marquage CE 2797 : identification de l'organisme notifié

3. Indication d'utilisation

Predigraft est un dispositif médical destiné à être utilisé comme un outil prédictif pour informer les professionnels de santé sur la probabilité de survie des allogreffes de rein après une transplantation rénale. Ces probabilités, ainsi que toutes les données cliniques standards disponibles, aident à décrire l'état de l'allogreffe et constituent une information supplémentaire dans la décision relative aux soins et au traitement du patient. Plus précisément, Predigraft fournit des probabilités de survie des allogreffes à +3 / +5 / +7 années après l'évaluation, sur la base de la combinaison d'un ensemble de paramètres cliniques, biologiques et histologiques.

Predigraft est également destiné à être utilisé comme un outil de télésanté après une transplantation rénale pour faciliter la communication entre le clinicien et le patient en fournissant un système d'alertes personnalisables.

Attention : La télésurveillance n'est pas un système d'urgence. En cas de problème d'ordre médical, Les patients doivent contacter un professionnel de santé ou le SAMU.

3.1. Utilisateurs prévus

La solution Predigraft est destinée à être utilisée par :

- Les professionnels de santé impliqués dans le traitement et suivi des patients transplantés du rein tels que les néphrologues, les infirmières...
- Les patients transplantés du rein.

3.2. Population cible de patient

Critères de sélection de patient :

- Patient ayant reçu une greffe du rein d'un donneur du vivant ou décédé,
- Patient âgé de 18 ans minimum.

3.3. Contre-indication

Predigraft ne peut être utilisé pour le suivi des patients ayant eu :

- Une absence de reprise de fonction suite à la transplantation rénale,
- Une transplantation combinée (par exemple, transplantation de rein - cœur, transplantation de rein - foie).
- Une transplantation datant de moins d'un mois.

4. Principe de fonctionnement et mode d'action

4.1. La technologie iBox

Predigraft est développé en utilisant la technologie "integrative BOX" (iBox).

L'iBox est un algorithme prédictif développé par le Paris Transplant Group (INSERM UMR 970 ; Investigateur principal : Professeur Alexandre LOUPY). L'algorithme prédit la survie des allogreffes à 3, 5 et 7 ans après l'évaluation du risque avec un calibrage et une discrimination précise (indice de concordance 0,81 ; intervalle de confiance à 95% - 0,79 à 0,83). Il a été développé dans une cohorte de 4000 patients greffés du rein en France et validé dans une cohorte de 2129 patients en Europe et une seconde cohorte de 1428 patients dans trois centres aux États-Unis.

4.2. Mode d'action

Predigraft est utilisé comme un outil de surveillance/évaluation des risques pour les patients ayant subi une greffe de rein.

Lors du suivi des patients, le professionnel de santé utilise Predigraft comme outil pour surveiller ses patients. Il peut recueillir des informations cliniques, biologiques et histologiques et peut être informé des probabilités de survie à long terme des allogreffes. Le risque de perte d'allogreffe est évalué sur la base des paramètres biologiques utilisés dans le suivi clinique lors des soins standard, à savoir : la créatinine (pour estimer le taux de filtration glomérulaire selon la modification du régime alimentaire dans les maladies rénales ; unité ml/min/1,73 m²) et le rapport protéines urinaires/créatinine urinaire (unité g/g). Un rapport est généré et aide à décrire l'état de l'allogreffe, ainsi il constitue une information supplémentaire dans la décision de soins et de traitement du patient.

Predigraft est également utilisé comme un outil de télésurveillance après une transplantation rénale pour faciliter la communication entre le professionnel de santé et le patient en fournissant un système d'alertes personnalisables. Le patient peut envoyer des informations cliniques (pression artérielle, poids) et biologiques (rapports biologique et histologique) à son professionnel de santé.



5. Caractéristiques techniques/prérequis

L'outil Predigraft dédié aux professionnels de santé est disponible en mode SaaS (Software as a Service) via le web. L'application est compatible avec les principaux navigateurs ci-dessous :

Navigateur	Version compatible
Chrome	≥ Version 81

Firefox	≥ Version 75
Safari	≥ Version 14
Edge	≥ Version 91

Note : Il est nécessaire de disposer d'une connexion internet pour utiliser Predigraft. L'utilisation de Predigraft ne requiert pas de formation particulière.

6. Authentification/Création de compte

A la création d'un compte, l'équipe Cibiltech configure l'accès à l'application selon deux profils :



1.  Propriétaire du service
2.  Membre du service

Les droits d'accès et les fonctionnalités sont différents pour ces profils.

L'équipe Cibiltech crée le compte utilisateur "propriétaire" puis le service associé à cet utilisateur. L'équipe Cibiltech crée autant de services que nécessaires. Il y a un propriétaire par service.

6.1. Vous êtes propriétaire du service

Lors de votre souscription, vous recevez un lien vers la page "Mot de passe oublié" via courriel. Sur cette page, renseignez votre adresse courriel pour recevoir un lien de réinitialisation. En cliquant sur le lien depuis votre courriel, vous êtes redirigé vers une page où vous renseignez votre mot de passe, et une confirmation du mot de passe. Vous êtes alors connecté à l'application en tant que "Propriétaire du service".

6.2. Vous êtes membre du service

Le propriétaire du service envoie un courriel d'invitation aux membres via l'interface Predigraft. Si vous êtes invités, vous êtes dans la liste des utilisateurs autorisés à créer un compte sur Predigraft.

Quand vous êtes invité dans un service, vous recevez un lien d'invitation par courriel. Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers la page de "Création de compte". Vous devez renseigner votre nom, votre adresse mail (identique à l'adresse sur laquelle l'invitation a été reçue), votre mot de passe, et le confirmer. Vous êtes alors connecté à l'application en tant que "Membre du service".

6.3. Vous êtes un utilisateur (propriétaire ou membre) de Predigraft

Pour activer votre compte (propriétaire ou membre), vous devez :

- Confirmer votre adresse mail en cliquant sur un lien qui vous est envoyé par mail,
- Lire et accepter les Conditions Générales d'Utilisations (CGU).



Mot de passe oublié :

En cas d'oubli de votre mot de passe, sur la page de connexion, vous pouvez cliquer sur "Mot de passe oublié ?". Sur cette page, renseignez votre adresse mail pour recevoir un lien de réinitialisation. En cliquant le lien depuis votre courriel, vous êtes redirigé vers une page où vous renseignez votre mot de passe et une confirmation du mot de passe.



Attention : Les mots de passe sont personnels et confidentiels. Ils ne doivent pas être partagés avec un tiers. Ils sont régis par une politique de confidentialité.



Paramétrage du compte :

Une fois connecté, vous pouvez aller dans votre espace personnel, onglet "Compte". Vous avez la possibilité de modifier votre nom et votre mot de passe.

Compte

Paramètres de compte

Nom Modifier

Mail

Modifier le mot de passe

Mdp actuel

Nouveau mdp 👁

Confirmer le mdp

Modifier

© 2020 Cibiltech

7. Gestion de services

Ce module permet aux professionnels de santé de faire partie d'un service (de l'hôpital). Le propriétaire et les membres du service ont accès aux patients du service et aux rapports Predigraft créés pour chaque patient du service.

Lors de la souscription, le propriétaire aura un service associé.

7.1. Administration du service

Vous êtes un membre du service 

Pour accéder aux membres de votre service, cliquez sur votre nom en haut à droite, cliquez sur "Mon service" dans le menu déroulant, puis cliquez sur votre service.

Dans le bloc "Membres", vous pouvez consulter la liste des utilisateurs du service :

- Vous visualisez le nom complet et l'adresse mail du membre,
- Vous visualisez le badge "Propriétaire" à côté du nom du propriétaire du service,

Vous visualisez le badge "Membre" à côté du nom de chaque membre du service.

Membres du service "Bode-Pagac" ← Retour

Nom	Mail	Rôle
Miss Malika McKenzie	first.user@example.org	Propriétaire
Lucas Yost	third.user@example.org	Membre

Vous êtes le propriétaire du service 

Pour accéder aux membres de votre service, cliquez sur votre nom en haut à droite, cliquez sur “Mon service” dans le menu déroulant, puis cliquez sur votre service.

Dans la rubrique “**Inviter dans le service**”, vous pouvez :


- Renseigner l’adresse mail d’un collaborateur et cliquer sur “envoyer” pour envoyer un mail d’invitation à cet utilisateur. Si l’utilisateur renseigné fait déjà partie d’un autre service, vous ne pouvez pas l’inviter.

Dans la rubrique “**Invitations en attente**”, vous pouvez :

- Visualiser l’adresse mail de tous les collaborateurs invités à faire partie du service,
- Supprimer l’invitation : le collaborateur invité n’aura plus le droit de créer un compte sur Predigraft et ne pourra pas rejoindre votre service.

Dans la rubrique “**Membres**”, vous pouvez consulter la liste des utilisateurs du service :

- Vous visualisez le nom complet et le courriel du membre,
- Vous pouvez cliquer sur le bouton “supprimer” pour supprimer un membre de la liste des membres du service. Vous ne pouvez pas vous supprimer de la liste des utilisateurs du service.

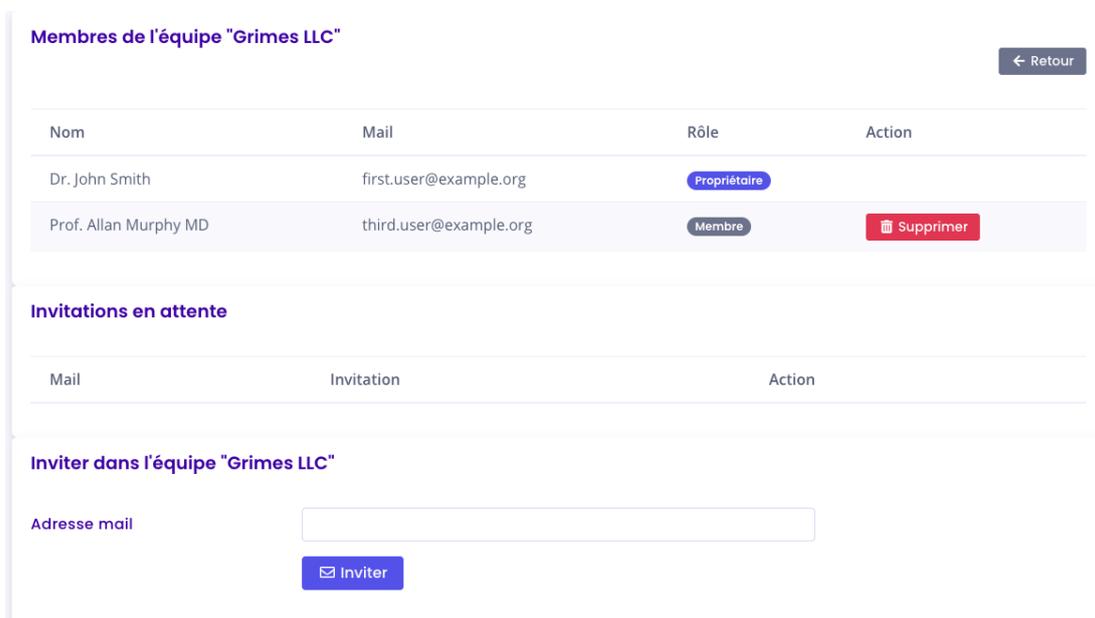

Membres de l'équipe "Grimes LLC" ← Retour

Nom	Mail	Rôle	Action
Dr. John Smith	first.user@example.org	Propriétaire	
Prof. Allan Murphy MD	third.user@example.org	Membre	Supprimer

Invitations en attente

Mail	Invitation	Action
------	------------	--------

Inviter dans l'équipe "Grimes LLC"

Adresse mail

8. Management des patients

8.1. Fiche patient

8.1.1. Création d'une fiche patient

En cliquant sur le bouton en haut à droite "nouveau patient", l'utilisateur crée un nouveau patient dans le service.

[+ Nouveau patient](#)

Modifier les informations du patient

[← Retour](#)

Données administratives

Prénom :

Deuxième prénom :

Nom de famille :

Sexe : Femme Homme

Date de Naissance :

ID :

Date de transplantation :

[Enregistrer les modifications](#)

Brève description du patient Limite de 300 caractères

Description

Exemple : Durée de suivi du patient, médecin référent, néphropathie, autres pathologies

[Enregistrer les modifications](#)

Identifiants des patients

IPP

INS

NEFG

NATT 1

NATT 2

Identifiant de l'étude clinique

[Enregistrer les modifications](#)

Professionnel de santé référent

[Ajouter un professionnel de santé référent](#)

Prof. Lorena Jast [Supprimer](#)

Mr Joesph Feeney I2 [Supprimer](#)


[Supprimer le dossier du patient](#)

Renseignez les informations suivantes pour créer la fiche patient :

- Nom,
- Deuxième prénom (facultatif),

- Nom de famille,
- Sexe,
- Date de naissance,
- ID (doit être unique au sein d'un service),
- Date de la transplantation.

Cliquez sur "Enregistrer ce patient". Une fenêtre apparaît pour vous rappeler les informations que contiendra la fiche patient. Cliquez sur "Confirmer" pour créer le patient. Cliquez sur "Annuler" pour modifier les informations renseignées sur la fiche patient.

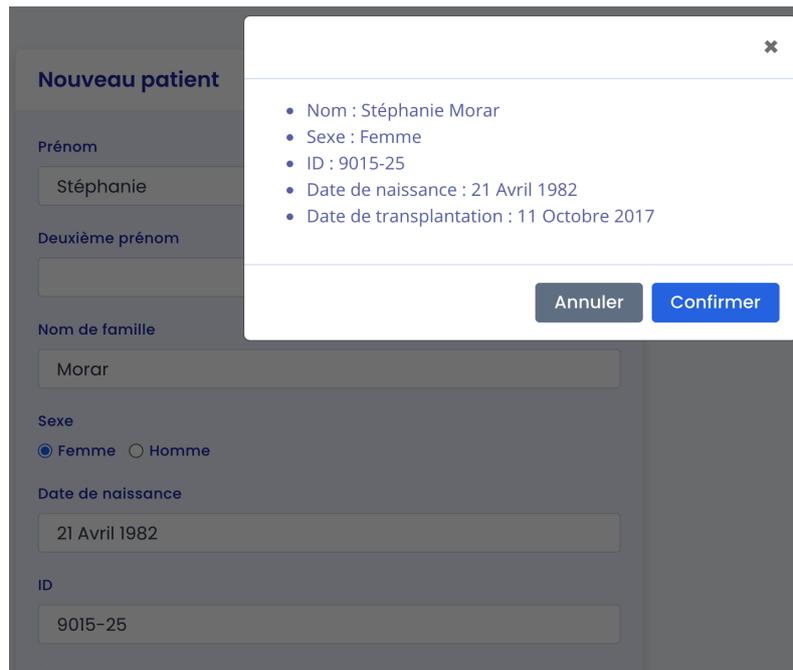

The image shows a web interface for creating a new patient. The main form is titled "Nouveau patient" and contains the following fields:

- Prénom: Stéphanie
- Deuxième prénom: (empty)
- Nom de famille: Morar
- Sexe: Femme Homme
- Date de naissance: 21 Avril 1982
- ID: 9015-25

A modal window is overlaid on the form, displaying a summary of the entered information:

- Nom : Stéphanie Morar
- Sexe : Femme
- ID : 9015-25
- Date de naissance : 21 Avril 1982
- Date de transplantation : 11 Octobre 2017

At the bottom of the modal window are two buttons: "Annuler" and "Confirmer".

8.1.2. Modification d'une fiche patient

Pour modifier une fiche patient, cliquez sur le patient depuis la liste de patients pour accéder à sa fiche. Cliquez sur "Modifier" dans le bandeau de titre. Vous pouvez modifier les informations suivantes sur la fiche patient :

- Données administratives :
 - Nom,
 - Deuxième prénom (facultatif),
 - Nom de famille,
 - Sexe,
 - Date de naissance,
 - ID (doit être unique au sein d'un service),
 - Date de la transplantation.
- Brève description patient :
 - Description (facultatif).
- Identifiant Patient :
 - IPP (Identifiant Permanent du Patient),

- NEFG du receveur,
 - NATT,
 - INS,
 - Identifiant d'étude clinique.
- Médecin référent.

Attention :

- Le champ description possède une limite de 300 caractères.
- Le champ IPP commence toujours par le nombre 80 et peut contenir entre 8 et 13 caractères.
- Le champ du numéro NEFG n'accepte que des valeurs numériques entières.
- Le champ numéro NATT n'accepte que des valeurs numériques entières.
- Le numéro INS n'accepte que 15 chiffres : le premier ne peut être que 1 ou 2 et les 4e et 5e ne peuvent être compris qu'entre 01 et 12.

Données administratives

Prénom :

Deuxième prénom :

Nom de famille :

Sexe : Femme Homme

Date de Naissance :

ID :

Date de transplantation :

[Enregistrer les modifications](#)

Professionnel de santé référent

[Ajouter un professionnel de santé référent](#)

Prof. Lorena Jast [Supprimer](#)

Mr Joesph Feeney I2 [Supprimer](#)

Brève description du patient Limite de 300 caractères

Description

Exemple : Durée de suivi du patient, médecin référent, néphropathie, autres pathologies

[Enregistrer les modifications](#)

Identifiants des patients

IPP

INS

NEFG

NATT 1

NATT 2

Identifiant de l'étude clinique

[Enregistrer les modifications](#)

[Supprimer le dossier du patient](#)

Cliquez sur "Enregistrer les modifications". Une fenêtre apparaît pour vous rappeler les informations que contiendra la fiche patient. Cliquez sur "Confirmer" pour appliquer les changements. Cliquez sur "Annuler" pour continuer à modifier la fiche. Cliquez sur "Enregistrer les modifications".

8.1.3. Suppression d'une fiche patient

Pour supprimer une fiche patient, cliquez sur le patient depuis la liste de patients pour accéder à sa fiche. Cliquez sur "Modifier" dans le bandeau de titre.

En bas de la page de Modification de la fiche patient, cliquez sur "Supprimer". Vous devez confirmer la suppression en appuyant sur un le bouton "Supprimer le patient".



8.2. Gestion d'un patient

Chaque service a ses propres patients. Les informations ci-dessous sont consultables sur la fiche patient :

- Informations patient,
- Messagerie,
- Alertes du patient,
- Surveillance / Évaluation du risque : lien vers les évaluations iBox du patient,
- Débit de filtration glomérulaire estimé (DFG-e) selon MDRD : graphique de visualisation des valeurs de DFG-e (par défaut),
- Pression artérielle : graphique de visualisation de la pression artérielle,
- Poids : graphique de visualisation du poids,
- Médicaments immunosuppresseurs : graphique de visualisation des médicaments immunosuppresseurs,
- Tableau biologique,
- Notes médicales du médecin,
- Ordonnances,
- Comptes-rendus,
- Analyses biologiques,
- Biopsie (rapport d'analyse histologique),
- DSA,
- Autres documents.

☆ Patient : Jodie G. Klocko (709-14-2070) ...
Femme, 41 ans née le 26 mai 1979, transplantée le 28 juin 2013 (il y a 7 ans)

Créer un compte patient Modifier

Messagerie Importer un document

Surveillance / Evaluation du risque + Nouvelle évaluation iBox


Date	Données	3 ans	5 ans	7 ans
15 mai 2020	🩺 🩹 🩺	81%	71%	58%
15 avr. 2020	🩺 🩹 🩺	96%	96%	84%
15 mars 2020	🩺 🩹 🩺	0%	0%	0%
15 févr. 2020	🩺 🩹 🩺	88%	81%	74%
15 janv. 2020	🩺 🩹 🩺	79%	69%	57%

DFG Estimé Pression artérielle Poids

Aucune donnée de DFG estimé.

+ Nouveau rapport

Médicaments immunosuppresseurs

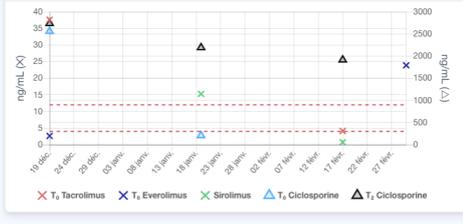

© 2021 Cibiltech

Tableau biologique

Notes médicales Ordonnances Comptes rendus

Enregistrer

Analyses biologiques Biopsie DSA

Aucun rapport d'analyses biologiques.

Autres documents

Aucun autre document.

8.2.1. Ajout d'un patient en favoris

Dans la fiche patient, ce bouton ☆ situé en haut à gauche permet d'ajouter le patient dans la liste "Mes patients" ou de le retirer de cette liste.

Une étoile pleine ★ : le patient est dans la liste "Mes patients".

Une étoile vide ☆ : le patient n'est pas dans la liste "Mes patients".

Note : Chaque utilisateur a sa propre liste "Mes patients". Cette liste appartient à l'utilisateur et non au service. Elle peut aussi être consultée à partir du bouton "Mes patients" dans le menu principal situé à gauche (voir le chapitre 12 Gestion de la liste « Mes patients »).

8.2.2. Création d'un accès pour le patient

Depuis chaque fiche patient, vous pouvez inviter un patient à utiliser l'application patient de Predigraft. Cliquez sur le bouton « Créer un compte patient » dans le bandeau de titre.

☆ Patient : Jodie G. Klocko (709-14-2070) ...
Femme, 41 ans née le 26 mai 1979, transplantée le 28 juin 2013 (il y a 7 ans)

Créer un compte patient Modifier

Messagerie Importer un document

Puis renseignez l'adresse mail du patient et le médecin référent en charge du patient.

Création d'un nouveau compte patient

Renseignez l'e-mail du patient.

`createPatientAccount.referringHcp`

Annuler
Créer un compte patient

Le bouton “Créer un compte patient” est alors remplacé par le texte “Un email de confirmation a été envoyé”.

☆ **Patient : Duncan Q. Kerluke (700-58-6258) ---**

Femme, 46 ans née le 24 oct. 1974, transplantée le 10 avril 2017 (il y a 4 ans)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec.

Un email de confirmation a été envoyé
Modifier

Envoyer un nouvel email de confirmation

Messagerie
Importer un document

Le patient reçoit un email lui indiquant les étapes à suivre pour finaliser la création du compte et confirmer son adresse mail. Une fois confirmé, le texte “Un email de confirmation a été envoyé” est remplacé par “Le patient a un compte” et l’adresse mail correspondante du patient.

Notes :

Un message d’erreur s’affiche lorsque le médecin entre un email patient déjà existant.

Pour comprendre les échanges de données entre l’interface médecin et l’interface patient, consultez le chapitre 14 « Application patient ».

8.2.3. Vous pouvez envoyer à nouveau un mail de confirmation au patient si ce dernier n'a pas reçu de mail. En cas de confirmation de mail de la part du patient, vous ne pouvez plus modifier son adresse mail. **Messagerie**

Vous pouvez envoyer des messages à votre patient au travers d'une messagerie spécialisée. Vous pouvez accéder à votre messagerie à partir d'une fiche patient ou du menu "Messagerie" (voir le chapitre Gestion de la messagerie).

À partir d'une fiche patient, cliquez sur "Messagerie" dans le bandeau de la fiche de votre patient.

★ **Patient : Maximo N.Ral Cummerata (748-32-5297ma) ...**
 Homme, 52 ans né le 10 nov. 1968, transplanté le 25 août 2011 (il y a 9 ans)

Un email de confirmation a été envoyé Modifier

Envoyer un nouvel email de confirmation


Messagerie
Importer un document

La conversation avec votre patient s'affiche. Vous pouvez accéder à toutes les conversations de vos patients ayant un compte Predigraft activé, même ceux avec qui vous n'avez encore jamais échangé.

Vous pouvez afficher seulement les conversations de vos patients présents dans la liste « Mes patients » en cochant la case « Mes patients ».

Vous pouvez afficher seulement les conversations non lues de vos patients en cochant la case « Messages non lus ».

Note : Le filtre « Mes patients » est activé par défaut. Le filtre « Messages non lus » est désactivé par défaut.

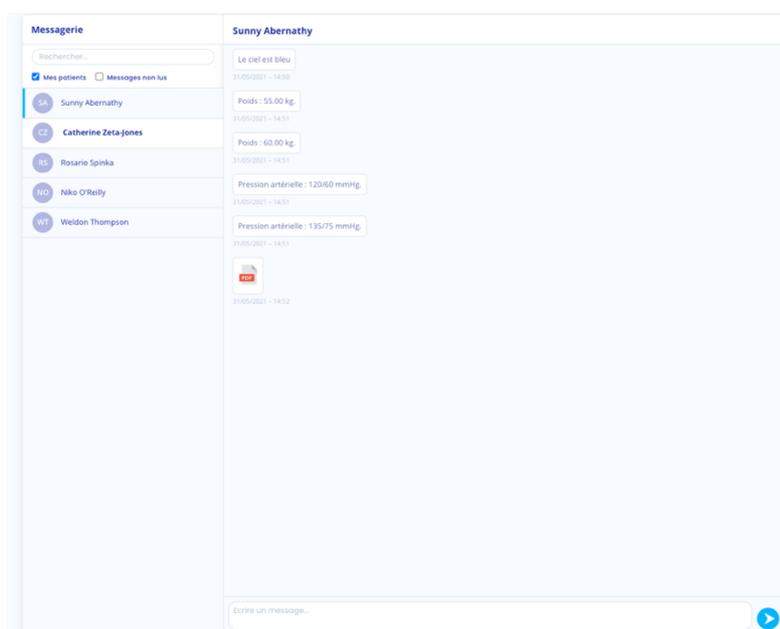

Pour changer de conversation, cliquez sur le nom du patient souhaité. Une barre bleue apparaît alors sur le côté précisant que vous êtes bien sur la conversation.


Vous avez aussi la possibilité de rechercher un patient en cliquant sur la barre de recherche en haut à gauche de votre messagerie.

Lorsque le nom du patient apparaît en gras, cela signifie que vous avez un message non lu. Lorsque vous cliquez dessus, le nom du patient n'apparaît plus en gras.

Note : Les conversations sont rangées du message le plus récent au plus ancien.

Vous pouvez cliquer sur le nom du patient en haut de la messagerie pour accéder à sa fiche patient.


Lorsqu'un de vos patients vous envoie un message, une pastille rouge dans le menu "Messagerie" apparaît. Ce compteur énumère le nombre de conversations non lues dans la liste "Mes patients".

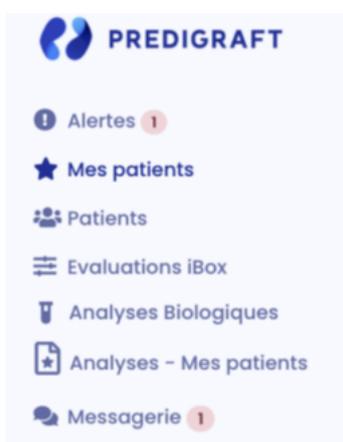

Ainsi, lorsque vous lisez un message initialement non lu, la pastille rouge descend d'un point.

Attention : Si un patient vous envoie 5 messages, la pastille rouge prend seulement en compte la conversation non lue et non le nombre de messages non lus. Les messages non lus par conversation seront indiqués par une pastille bleue à côté de la conversation.

Lorsqu'un patient vous envoie sa pression artérielle ou un poids, cela n'est pas considéré comme un message. La pastille rouge ne prend en considération seulement l'envoi de message et de document.

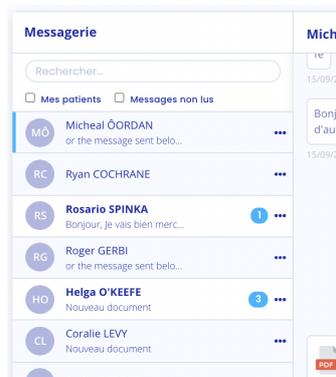

8.2.4. Alertes

Tous les détails concernant les alertes sont disponibles dans le chapitre 16 « Alertes » de ce document.

8.2.5. Surveillance / Évaluation du risque

Surveillance / Évaluation du risque		+ Nouvelle évaluation iBox		
Date	Données	3 ans	5 ans	7 ans
18 janv. 2021		88 %	82 %	75 %
6 janv. 2021		42 %	25 %	13 %
7 nov. 2020		75 %	64 %	51 %
25 mai 2019	  	95 %	93 %	89 %
25 avr. 2019	 	85 %	77 %	68 %
25 mars 2019	 	84 %	76 %	66 %

En cliquant sur « Nouvelle évaluation iBox », vous pouvez créer une évaluation iBox.

L'élément Surveillance/Évaluation du risque liste les évaluations iBox du patient. Vous pouvez cliquer sur une des lignes de la liste pour accéder à l'évaluation iBox correspondante.

La date correspond à la date renseignée dans la première étape "DFG-e" à la création de l'évaluation.

Les données correspondent à :

-  Données biologiques. Cette icône est toujours présente. Elle correspond aux étapes 1 et 2 de création de l'évaluation iBox, respectivement DFG-e et Protéinurie.
-  Données d'anticorps anti-HLA spécifiquement dirigés contre le greffon (DSA). Cette icône est présente si vous avez renseigné des données dans l'étape 3 - DSA lors de la création de l'évaluation iBox.
-  Données d'histologie. Cette icône est présente si vous avez renseigné des données dans l'étape 4 - Histologie lors de la création de l'évaluation iBox.

8.2.6. DFG estimé

Vous pouvez visualiser la valeur de Débit de Filtration Glomérulaire estimé (DFG-e) par la formule MDRD. Cette valeur provient des données entrées dans le tableau biologique (voir le chapitre 8.2.12 « Tableau biologique »).


Vous pouvez lire les données précises en passant votre curseur de souris sur les points du graphique.



8.2.7. Pression artérielle

Vous pouvez visualiser les pressions systoliques et diastoliques du patient au cours du temps. Les lignes rouges en pointillé sont données à titre indicatif pour les valeurs systolique minimale et maximale généralement recommandées pour la pression systolique.

Vous pouvez lire les données précises en passant votre curseur de souris sur les points du graphique.

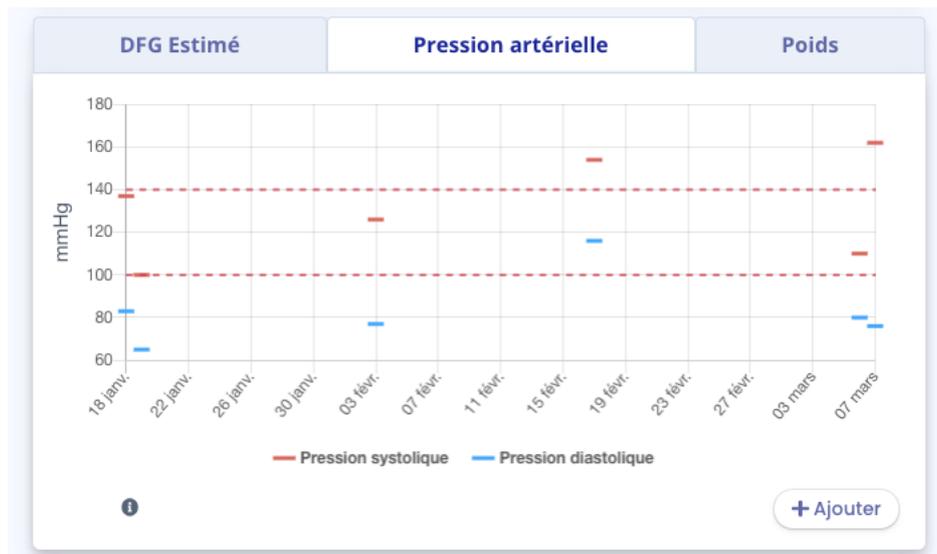

Cliquez sur le bouton “Ajouter” pour renseigner les valeurs de pression systolique et diastolique à une date donnée.

Ajouter une valeur de pression artérielle

Systolique / Diastolique / mmHg

Date

En cliquant sur "Ajouter", vous pouvez aussi supprimer une pression artérielle via la croix située à droite.

Ajouter une valeur de pression artérielle

Systolique / Diastolique / mmHg

Date

Historique

148 / 111	1 déc. 2020	×
138 / 72	20 nov. 2020	×
124 / 66	19 nov. 2020	×
116 / 68	4 nov. 2020	×
139 / 87	9 oct. 2020	×
145 / 114	8 oct. 2020	×

Annuler

Enregistrer

Vous devez indiquer la raison de la suppression : Erreur patient ou Erreur Médecin, puis confirmer la suppression. Par défaut, la raison est "Erreur patient".

Ajouter une valeur de pression artérielle

Systolique / Diastolique / mmHg

Date

Historique

169 / 129	17 déc. 2020	×
------------------	--------------	---

Pourquoi voulez-vous supprimer la valeur ? ▼

Annuler

 Confirmer la suppression

126 / 74	5 déc. 2020	×
112 / 73	22 oct. 2020	×
134 / 80	18 oct. 2020	×
169 / 134	5 oct. 2020	×
162 / 127	21 sept. 2020	×

Annuler

Enregistrer

8.2.8. Poids

Vous pouvez visualiser le poids du patient au cours du temps.

Copyright © 2021 Cibiltech

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de Cibiltech

Vous pouvez lire les données précises en passant votre curseur de souris sur les points du graphique.



Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour renseigner une valeur de poids à une date donnée.

Ajouter un poids

Poids kg

Date

En cliquant sur “Ajouter”, vous pouvez aussi supprimer un poids via la croix située à droite.

Ajouter un poids

Poids kg

Date

Historique

76.05 kg	15 déc. 2020	<input type="button" value="x"/>
97.61 kg	11 nov. 2020	<input type="button" value="x"/>
86.82 kg	30 oct. 2020	<input type="button" value="x"/>
60.16 kg	11 oct. 2020	<input type="button" value="x"/>
63.68 kg	24 sept. 2020	<input type="button" value="x"/>
71.40 kg	22 sept. 2020	<input type="button" value="x"/>

Vous devez indiquer la raison de la suppression : Erreur patient ou Erreur Médecin, puis confirmer la suppression. Par défaut, la raison est “Erreur patient”.

Ajouter un poids

Poids	<input type="text"/>	kg
Date	<input type="text" value="Y-m-d"/>	

Historique

92.09 kg	7 déc. 2020	x
Pourquoi voulez-vous supprimer la valeur ?		
		Erreur patient
<input type="button" value="Annuler"/>	<input type="button" value="Confirmer la suppression"/>	
85.68 kg	25 nov. 2020	x
83.34 kg	17 nov. 2020	x
83.95 kg	2 nov. 2020	x
77.18 kg	2 nov. 2020	x
63.00 kg	4 oct. 2020	x

8.2.9. Médicaments immunosuppresseurs


Vous pouvez visualiser les concentrations de médicaments immunosuppresseurs (T₀ Tacrolimus, T₀ Ciclosporine, T₂ Ciclosporine, T₀ Everolimus, T₀ Sirolimus). Les lignes rouges en pointillé correspondent aux valeurs minimale et maximale recommandées pour T₀ Tacrolimus.

- Si le patient a des valeurs correspondant à T₀ Tacrolimus, T₀ Everolimus, T₀ Sirolimus : la lecture se fait sur l'axe gradué de gauche.
- Si le patient a des valeurs correspondant à T₀ Ciclosporine, T₂ Cyclosporine : la lecture se fait sur un nouvel axe gradué qui apparaît sur la partie droite du graphique.

Vous pouvez lire les données précises en passant votre curseur de souris sur les points du graphique.

Les valeurs proviennent du tableau biologique, vous pouvez en ajouter en important un rapport d'analyse biologique et en validant les données extraites de ce rapport (voir le chapitre 8.2.12 "Tableau biologique").

Exemple d'un patient qui a des valeurs de T₀ Tacrolimus :

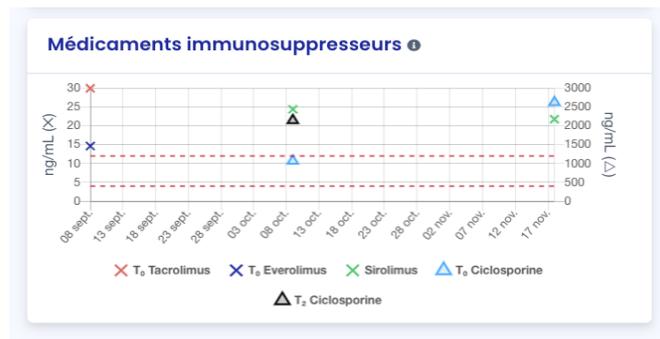

8.2.10. Mini tableau biologique

À partir de la fiche patient, vous pouvez visualiser un mini tableau biologique avec sept données importantes collectées à partir de rapports d'analyse biologique que vous avez importés :

- Potassium (mmol/L),
- Créatinine (mol/L),
- Hémoglobine (g/dL),
- Neutrophiles polynucléaires ($10^9/L$),
- Ratio protéine créatinine (g/g),
- Leucocytes (/mm³),
- Plaquettes (/mm³).

8.2.11. Tableau biologique

En cliquant sur « Plus » dans le mini tableau biologique, vous pouvez visualiser l'intégralité des données collectées à partir de rapports d'analyse biologique. Le tableau biologique en entier est composé de différentes données :

- La date,
- La valeur remplie avec la prévisualisation du rapport d'analyse biologique à côté,
- L'unité de la donnée biologique.

Biologie + Nouvelle Evaluation iBox						
<input checked="" type="checkbox"/> Sang <input type="checkbox"/> Urine						
Jour après transplantation	04/09/2020	04/09/2020	15/09/2020	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
Temps après transplantation	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois
Analyse associée						
Hémoglobine glyquée (%)			👁	👁	👁	👁
Glucose (mmol/L)			5.09	6.33		
Sodium (mmol/L)			141.00	141.00		
Potassium (mmol/L)			4.10	3.90		
CO2 total (mmol/L)				20.00		
Protéine (g/L)				71.00		
Urée (mmol/L)			4.20			
Créatinine (µmol/L)			140.00	161.78	700.00	
DFG (mL/min/1.73m2) 📍	73.00		51.00	37.00	7.81	
Calcium (mmol/L)				2.50		
Phosphore (mmol/L)				0.71		
Magnésium (mmol/L)						
Acide urique (µmol/L)						
Bilirubine totale (µmol/L)				9.07		
Bilirubine conjuguée (µmol/L)						
ALAT (UI/L)				15.00		
ASAT (UI/L)				15.00		
Alcaline phosphatase (UI/L)				86.00		
Gamma GT (UI/L)				18.00		
LDH (UI/L)						

Attention : Les données “Créatinine” et “Hémoglobine” sont importantes, ainsi elles se présentent de couleur rouge à l’écran.

De plus, toutes les données (sang et urine) d’un rapport d’analyse biologique ne sont pas présentes dans ce tableau biologique. Voici les données qui n’apparaissent pas dans le tableau biologique :

- Chloride,
- Amylase,
- Cholestérol total,
- HDL-cholestérol,
- Dihydroxyvitamine D,
- Temps de prothrombine,
- TCA (Temps de céphaline activée),
- Anticorps Ab,
- Hématies,
- VIH,
- VHB,
- VHC,
- Ciclosporine T0,
- Ciclosporine T2,
- Tacrolimus T0,
- Sirolimus T0,
- Everolimus T0,
- PSA (Antigène prostatique spécifique),
- Urée.

Si vous souhaitez consulter seulement les données hématologiques, décochez la case “Urine”.

Biologie + Nouvelle Evaluation iBox

Sang Urine

Jour après transplantation	04/09/2020	04/09/2020	15/09/2020	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
Temps après transplantation	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois
Analyse associée						
Hémoglobine glyquée (%)						
Glucose (mmol/L)			5.09	6.33		
Sodium (mmol/L)			141.00	141.00		


Si vous souhaitez consulter seulement les données liées aux urines, décochez la case “Sang”.

Biologie + Nouvelle Evaluation iBox

Sang Urine

Jour après transplantation	04/09/2020	04/09/2020	15/09/2020	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021
Temps après transplantation	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	2 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois	3 ans, 4 mois
Analyse associée						
Volume urinaire (L/24h)						
Protéines des urines (g/L)			0.80	9.00		
Rapport protéine-créatinine (g/g)		5.00	1.01	12.00		13.00
Créatinine des urines (mmol/L)			7.00			
Sodium des urines (mmol/L)				126.00		
Potassium des urines (mmol/L)				25.00		

Si vous souhaitez afficher l'évolution d'une donnée spécifique sous forme de graphique, cliquez sur la ligne correspondant à la donnée. Le graphique s'affiche alors en haut du tableau biologique.

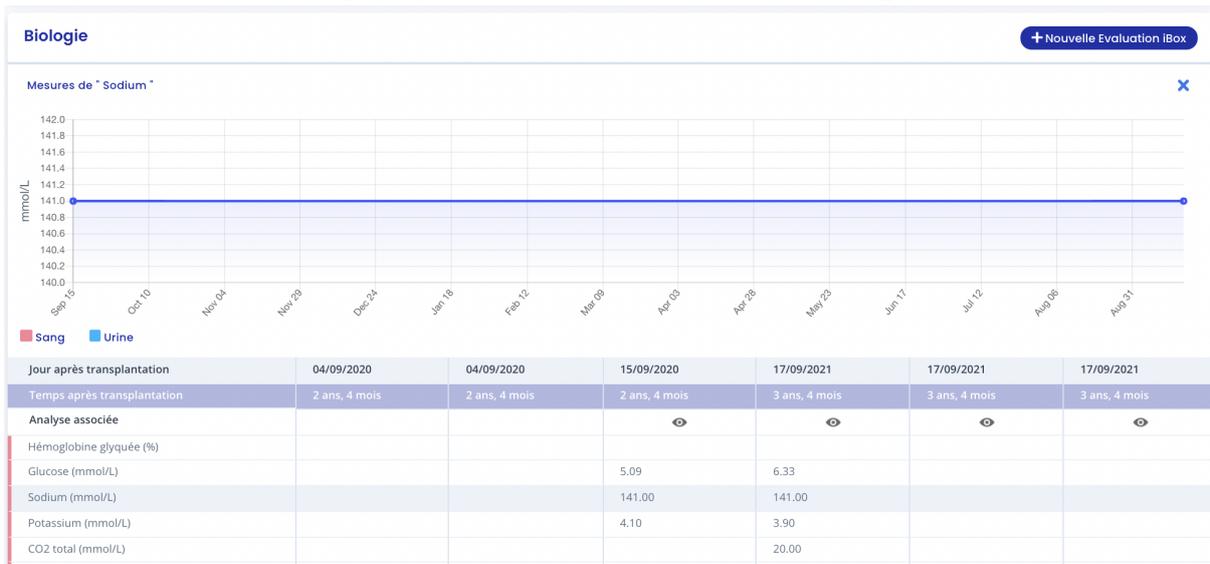

Pour enlever l'affichage du graphique, vous avez la possibilité de cliquer sur la croix à droite du graphique.

Note : Les documents envoyés par votre patient apparaissent dans le tableau biologique sur la ligne “analyse associée”. Si un document est modifié, le document dans le tableau biologique est également modifié. Si un document est supprimé, le document dans le tableau biologique est également supprimé. Il vous suffit

d'appuyer sur l'icône  pour accéder à l'analyse associée.

8.2.12. Notes médicales

Vous pouvez ajouter des notes médicales dans la fiche patient avec un maximum de 1500 caractères.

Lorsque vous ajoutez une note médicale, celle-ci est sauvegardée et affichée dans l'historique des notes médicales en dessous. Chaque note sauvegardée apparaît avec la date de sauvegarde et le nom de la personne qui a rédigé la note.

Chaque professionnel de santé peut avoir accès à l'historique des notes de chaque patient d'une même équipe.




Attention : Les notes médicales ne peuvent pas être partagées et restent confidentielles. Les professionnels de santé pourront uniquement les visualiser sur la fiche du patient.

8.2.13. Ordonnances

Vous pouvez ajouter des ordonnances dans la fiche patient en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre ordonnance à importer. Sélectionnez le type de document en cochant "Ordonnance".

Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case "Envoyer au patient". Cliquez ensuite sur "Importer".

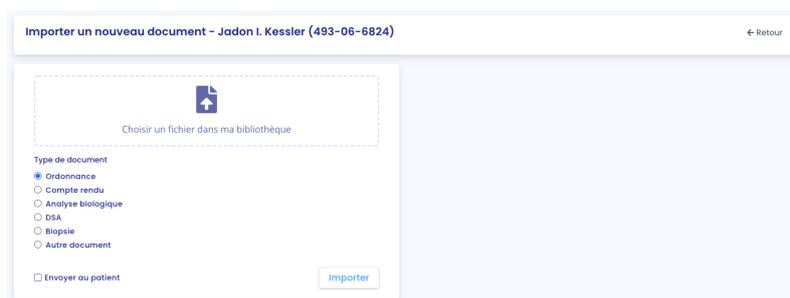

Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche "Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe".

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

À l'importation, vous êtes redirigé vers la fiche patient.

Dans la liste des ordonnances importées, le rapport le plus récemment importé est en haut de la liste.

La liste contient les informations suivantes :

- Date de l'import du document,
- Nom du document.

Vous pouvez télécharger une ordonnance ou l'envoyer à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger » ou « Envoyer au patient ».

Attention : L'option « Envoyer au patient » n'apparaît pas si le patient n'a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d'envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Vous pouvez aussi déplacer une ordonnance en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Déplacer ». En choisissant cette option, vous pouvez ensuite choisir une nouvelle catégorie :

- Compte rendu,
- Analyse biologique,
- DSA,
- Biopsie,
- Autres documents.



Notes médicales	Ordonnances	Comptes rendus
	<p> Bio5.pdf 27 juil. 2021</p> <p> Bio2.pdf 6 juil. 2021</p> <p> AnalyseBio.pdf 6 juil. 2021</p>	<p>...</p> <p>↓ Télécharger</p> <p>➤ Envoyer au patient</p> <p>➡ Déplacer</p> <p>...</p>

Note : Vous pouvez visualiser l'ordonnance en cliquant sur la ligne du document que vous souhaitez afficher. Le document s'ouvrira alors dans un autre onglet.

8.2.14. Compte-rendu

Vous pouvez ajouter des comptes rendus dans la fiche patient en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre compte-rendu à importer. Sélectionnez le type de document en cochant “Compte-rendu”.

Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case “Envoyer au patient”. Cliquez ensuite sur “Importer”.



Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche “Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe”.

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

À l'importation, vous êtes redirigé vers la fiche patient.

Dans la liste des ordonnances importées, le rapport le plus récemment importé est en haut de la liste.

La liste contient les informations suivantes :

- Date de l'import du document,
- Nom du document.

Vous pouvez télécharger un compte rendu ou l'envoyer à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger » ou “Envoyer au patient”.

Attention : L’option “Envoyer au patient” n’apparaît pas si le patient n’a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d’envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Vous pouvez aussi déplacer une ordonnance en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Déplacer ». En choisissant cette option, vous pouvez ensuite choisir une nouvelle catégorie :

- Ordonnance,
- Analyse biologique,
- DSA,
- Biopsie,
- Autres documents.

Notes médicales	Ordonnances	Comptes rendus
 Analyse.pdf 27 juil. 2021		...
 Bio1.pdf 6 juil. 2021		...
 Compte-rendu.pdf 29 juin 2021		...
 Ordonnance.pdf 29 juin 2021		...

↓ Télécharger

✈ Envoyer au patient

➦ Déplacer

Note : Vous pouvez visualiser le compte rendu en cliquant sur la ligne du document que vous souhaitez afficher. Le document s'ouvrira alors dans un autre onglet.

8.2.15. Analyses biologiques

Vous pouvez visualiser la liste des rapports d’analyse biologique enregistrés dans la fiche patient.

Analyses biologiques	Biopsie	DSA
Titre	Confirmé par	
 Bio9-1.pdf 28/04/2021	À confirmer	...

La date est la date d’enregistrement du rapport dans la fiche patient. Le titre est le titre du rapport lors de son enregistrement. Vous pouvez visualiser si le document a été confirmé ou non :

- En cas de non-confirmation, un message “À confirmer” apparaît dans la colonne “Confirmé par”,
- En cas de confirmation, le nom de la personne qui a confirmé le rapport apparaît.

 Bio6.pdf 13/04/2021	À confirmer	...
 Bio8.pdf 13/04/2021	Mr Joesph Feeney I2	...

Vous pouvez supprimer une analyse biologique à condition qu'elle n'ait pas été encore validée. Pour ce faire, cliquez sur les trois petits points et sélectionnez « Supprimer ».

Vous pouvez aussi télécharger ou déplacer l'analyse biologique en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger » ou « Déplacer ». En choisissant l'option de déplacer un document, vous pouvez choisir une nouvelle catégorie parmi :

- Ordonnance,
- Compte rendu,
- DSA,
- Biopsie,
- Autres documents.

Vous pouvez envoyer une analyse biologique à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant "Envoyer au patient".

Attention : L'option "Envoyer au patient" n'apparaît pas si le patient n'a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d'envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Analyses biologiques		Biopsie	DSA
Titre	Confirmé par		
 Bio4.pdf 17/09/2021	Confirmer		
 Bio6_page-0002.pdf 17/09/2021	Prof. Lorena Jasi		
 Bio6_page-0006.pdf 17/09/2021	Confirmer		
 Analyse.pdf 17/09/2021	Confirmer		

-  Télécharger
-  Envoyer au patient
-  Déplacer
-  Supprimer

Vous pouvez ajouter des rapports d'analyse biologique en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre document d'analyse biologique à importer. Sélectionnez le type de document en cochant "Analyse biologique". Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case "Envoyer au patient". Cliquez ensuite sur "Importer".



Choisir un fichier dans ma bibliothèque

Type de document

Ordonnance
 Compte rendu
 Analyse biologique
 DSA
 Biopsie
 Autre document

Envoyer au patient

[Importer](#)

Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche "Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe".

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

Importer un nouveau document - Jadon I. Kessler (493-06-6824) ← Retour

Bio1.pdf x

Ou importer un autre document

Type de document

Ordonnance
 Compte rendu
 Analyse biologique
 DSA
 Biopsie
 Autre document

Envoyer au patient

[Importer](#)



**Laboratoire de Biologie Médicale
Gambetta**

10 avenue Gambetta - 75002 PARIS
Tel: 01 48 04 04 81
FINESS n°3 75460 7

Biologie Médicale Dr Sylvie Huber

DR ELI YOST
149 rue de Sévres
75015 PARIS

Madame DUPONT JEANNE
14 avenue Kléber
75016 PARIS

Nîco le 01/03/18 979
Demande n° 0219218-D-0035 - - -TP
Prélèvement du 02/02/18 à 12h54
F88 Non payés 4903 - 19400

Édité le samedi 3 février 2018 à 10:27

Résultats obtenus par consultation et téléchargement sécurisés
Le compte rendu original est disponible au laboratoire.

Compte rendu transmis par voie télématique

Hématologie

Hémogramme
(Socotec Cx800-D)

Hémoglobine	4,00 g/l	124 g/l
Hématocrite	11,2 %	35,0 %
V.G.M.	93,4	273,0 fL
T.C.M.H.	31,7 pg	273,0 fL
C.C.M.H.	36,6 pg	37,0 fL
Leucocytes	5,80 ucL	4,8 x 10 ⁹

Formule leucocytaire

Polynucléaires neutrophiles	50,2 %	2,91 ucL	1,6 x 10 ⁹
Polynucléaires éosinophiles	1,9 %	0,11 ucL	< 0,1
Polynucléaires basophiles	1,3 %	0,08 ucL	< 0,1
Lymphocytes	40,0 %	2,32 ucL	1,1 x 10 ⁹
Monocytes	4,6 %	0,28 ucL	0,2 x 10 ⁹

Plaquettes
Test effectué sur sang prélevé sur EDTA

323 ucL

100 x 10⁹

101 rue de Valenciennes - 75013 Paris
 01 48 04 04 81
 Biologie Médicale - Soins de Suite - Soins de Support - Soins de Prévention
 www.cerballiance.fr

Page 1/4

© 2021 Cibiltech

Copyright © 2021 Cibiltech
Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de Cibiltech


37

Cliquez ensuite sur « Envoyer », vous êtes redirigé vers une nouvelle page de validation des données.

Les données de l'analyse biologique sont analysées par Predigraft, extraites et regroupées en plusieurs parties :

- La date d'analyse,
- Une partie "Sang",
- Une partie "Urine".

Par défaut seules les données qui ont été extraites du rapport biologique sont affichées. Pour ajouter des données dans les champs vides, cliquez sur "Données vides".

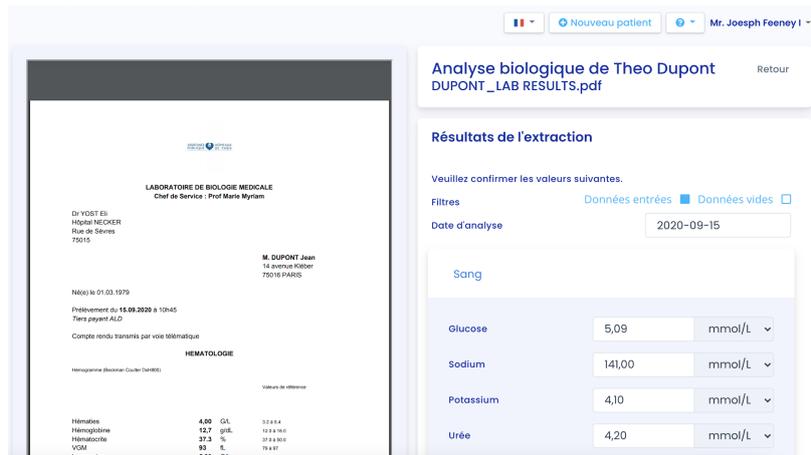


The screenshot shows a web interface for Predigraft. On the left is a PDF of a biological analysis report from 'LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE'. On the right is a digital representation of the report's data, titled 'Analyse biologique de Theo Dupont'. It includes a 'Résultats de l'extraction' section with a confirmation prompt and filters for 'Données entrées' (selected) and 'Données vides'. Below this, a list of blood test results is shown with input fields for values and units.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE			
Dr YVES ET			
Hôpital NECKER			
Rue de Sévres			
75015			
		M. DUPONT Jean	
		14 Avenue Babouin	
		75016 PARIS	
Né(e) le 01.03.1979			
Prélèvement du 15.09.2020 à 10h45			
Tiers payant ALD			
Compte rendu transmis par voie télématique			
HEMATOLOGIE			
Hémogramme (Recherche Cytarabine)			
Valeurs de référence			
Hémates	4,00	GL	3,2 à 4,4
Hémoglobine	12,7	g/dL	12,0 à 16,0
Hématocrite	37,3	%	37,3 à 47,0
VGM	93	fL	76 à 101
Leucocytes	6,80	GL	4 à 11,0

Vous pouvez visualiser toutes les données de l'analyse biologique qui ont été extraites à droite du rapport d'analyse biologique. En cas d'erreurs, vous pouvez modifier les champs (valeur et unité si disponible) de la date d'analyse, des données sanguines et des données urinaires.

Si une donnée peut s'enregistrer sous plusieurs unités, l'unité de référence de Predigraft est la première unité dans la liste.

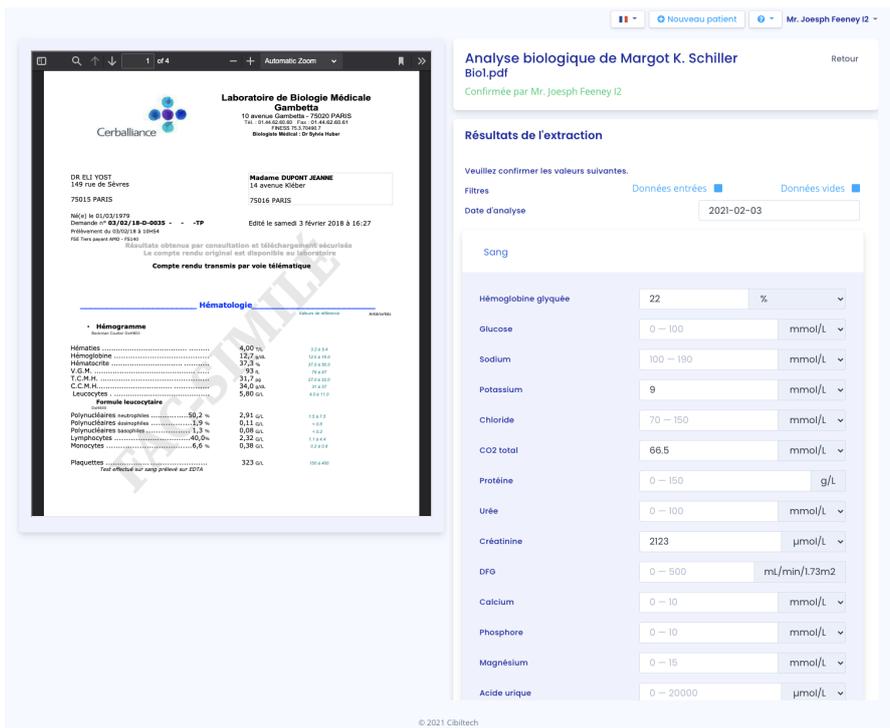

Analyse biologique de Margot K. Schiller
 Biol.pdf
 Confirmée par Mr. Joseph Feeney I2

Résultats de l'extraction

Vous confirmez les valeurs suivantes.

Filtres: Données entrées Données vides

Date d'analyse: 2021-02-03

Sang

Hémoglobine glyquée	22	%
Glucose	0 - 100	mmol/L
Sodium	100 - 190	mmol/L
Potassium	9	mmol/L
Chloride	70 - 150	mmol/L
CO2 total	66.5	mmol/L
Protéine	0 - 150	g/L
Urée	0 - 100	mmol/L
Créatinine	2123	µmol/L
DFG	0 - 500	ml/min/1.73m2
Calcium	0 - 10	mmol/L
Phosphore	0 - 10	mmol/L
Magnésium	0 - 15	mmol/L
Acide urique	0 - 20000	µmol/L


Vous pouvez cliquer sur “Enregistrer” pour sauvegarder toutes les données de l’analyse biologique. En cas de valeurs incohérentes lors de l’enregistrement, un message d’erreur apparaît. Par exemple :



Si les valeurs sont enregistrées avec succès, vous êtes redirigé vers un tableau biologique (voir le chapitre 8.2.12. “Tableau biologique”).

Lorsque vous choisissez une unité différente de l’unité de référence lors de l’extraction des données biologiques, Predigraft enregistre la donnée de deux manières :

- La valeur ainsi que l’unité que vous avez choisies,

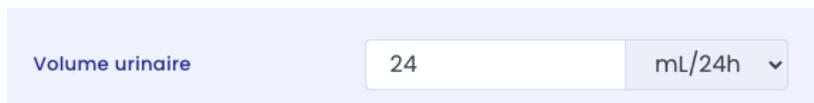

- La valeur convertie dans l’unité de référence : cette valeur sera affichée dans le tableau biologique (pour plus d’informations sur les unités de référence du tableau biologique voir l’annexe 3 de ce document).

Volume urinaire (L/24h)	0.02
-------------------------	------

Attention : Les données entrées dans le tableau biologiques peuvent donc différer de vos valeurs saisies pendant l’extraction de par le choix de l’unité.


Pour modifier les valeurs de l'extraction du rapport d'analyse biologique après avoir enregistré, depuis la fiche patient, cliquez sur le rapport d'analyse biologique correspondant dans la liste "Analyses Biologiques". Le rapport d'analyse s'ouvre et vous pouvez ainsi modifier les valeurs.

8.2.16. Biopsie

Vous pouvez visualiser la liste des rapports de biopsie importés par les membres de votre service.

Vous pouvez ajouter des rapports de biopsie en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre biopsie à importer. Sélectionnez le type de document en cochant "Biopsie".

Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case "Envoyer au patient". Cliquez ensuite sur "Importer".

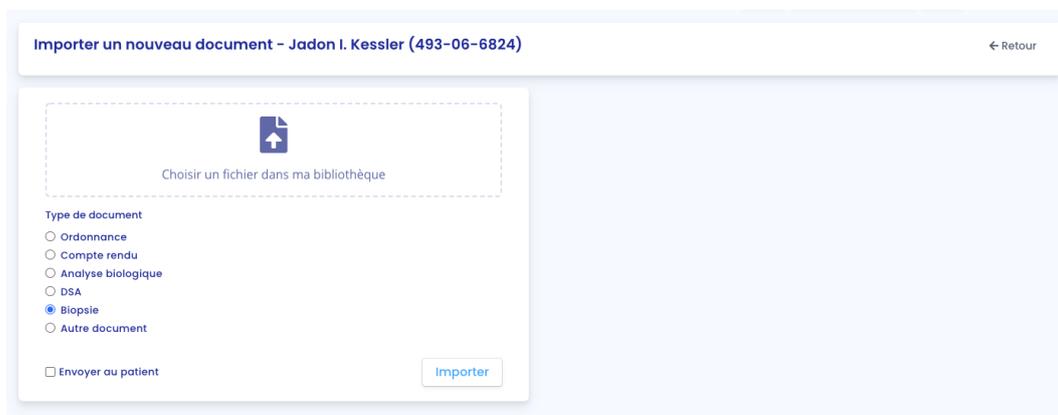

Importer un nouveau document - Jadon I. Kessler (493-06-6824) ← Retour

Choisir un fichier dans ma bibliothèque

Type de document

- Ordonnance
- Compte rendu
- Analyse biologique
- DSA
- Biopsie
- Autre document

Envoyer au patient

Importer

Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche "Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe".

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

Importer un nouveau document - Jadon I. Kessler (493-06-6824) ← Retour

Bio3.pdf ✕
 Ou importer un autre document

Type de document

- Ordonnance
- Compte rendu
- Analyse biologique
- DSA
- Biopsie
- Autre document

Envoyer au patient Importer

1 of 3
Automatic Zoom



LABORATOIRE DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D'ILE-DE-FRANCE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
(Régistre n° 33 0004 47 FINESS ET 82 002 843 5)
74 Avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
Biologistes : B. MECHAIN
Secrétariat : ☎ 01 41 17 43 52 ☎ 01 55 58 19 93

INSTITUT ALFRED FOURNIER NIF : DUPONT Date de naissance : 01/03/1979 Rende le :	Monsieur DUPONT JEAN 14 avenue Kléber 75016 PARIS Demande n° 07/11/20-4-0008 enregistrée à 07H02 Prélèvement du 07/11/20 à 08H02 Le 7 novembre 2020 à 15:44
---	---

Hématologie Valeurs de référence Antécédents

- ✓ **Hémogramme**
Système XSD100 : Mesure par impédance (GR, HT, PL), spectrophotométrie (HB), Fluorocytométrie en flux (GR, Formule, NET, EA)

À l'importation, vous êtes redirigé vers la fiche patient.

Dans la liste des rapports de biopsie importés, le rapport le plus récemment importé est en haut de la liste.

La liste contient les informations suivantes :

- Date de l'import du document,
- Type : analyse histologique,
- Nom du document.

Vous pouvez télécharger une biopsie en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger ».

Vous pouvez aussi déplacer une biopsie en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Déplacer ».

En choisissant cette option, vous pouvez ensuite choisir une nouvelle catégorie parmi :

- Ordonnance,
- Compte rendu,
- Analyse biologique,
- DSA,
- Autres documents.

Vous pouvez envoyer une biopsie à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant "Envoyer au patient".

Attention : L'option "Envoyer au patient" n'apparaît pas si le patient n'a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d'envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Analyses biologiques	Biopsie	DSA
Titre		
 Analyses-bio-1p-97ko.pdf 15 sept. 2021		...
 Ordonnance.pdf 15 sept. 2021		...
 Biopsie - Cibiltech.pdf 15 sept. 2021		...

↓ Télécharger

✉ Envoyer au patient

➡ Déplacer

Note : Vous pouvez visualiser la biopsie en cliquant sur la ligne du document que vous souhaitez afficher. Le document s'ouvrira alors dans un autre onglet.

8.2.17. DSA

Vous pouvez visualiser la liste des rapports DSA enregistrés dans la fiche patient.

Analyses biologiques	Biopsie	DSA
Date	Type	Titre
12 avr. 2021		Bio7.pdf

La date est la date d'enregistrement du rapport DSA dans la fiche patient.

Le titre est le titre du rapport DSA lors de son enregistrement.

Vous pouvez ajouter des rapports de DSA en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre document à importer. Sélectionnez le type de document en cochant "DSA".

Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case "Envoyer au patient".

Importer un nouveau document - Jadon I. Kessler (493-06-6824) ← Retour


 Choisir un fichier dans ma bibliothèque

Type de document

- Ordonnance
- Compte rendu
- Analyse biologique
- DSA
- Biopsie
- Autre document

Envoyer au patient

Importer

Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche "Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe".

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

Importer un nouveau document - Jadon I. Kessler (493-06-6824) ← Retour

Bio6.pdf ✕
 Ou importer un autre document

Type de document

- Ordonnance
- Compte rendu
- Analyse biologique
- DSA
- Biopsie
- Autre document

Envoyer au patient

Importer

1 of 6



Cliquez ensuite sur "Importer", vous êtes redirigé vers la fiche patient, vous pouvez ainsi visualiser le rapport DSA.

Vous pouvez télécharger un rapport DSA en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger ».

Vous pouvez aussi déplacer un rapport DSA en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Déplacer ». En choisissant cette option, vous pouvez ensuite choisir une nouvelle catégorie parmi :

Copyright © 2021 Cibiltech

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de Cibiltech

43

- Ordonnance,
- Compte rendu,
- Analyse biologique,
- Biopsie,
- Autres documents.

Vous pouvez envoyer un rapport DSA à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant “Envoyer au patient”.

Attention : L’option “Envoyer au patient” n’apparaît pas si le patient n’a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d’envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Analyses biologiques	Biopsie	DSA
Titre		
 AnalyseBio.pdf 27 juil. 2021		...
 Bio3.pdf 27 juil. 2021		...
 AnalyseBio.pdf 27 juil. 2021		...

↓ Télécharger

📧 Envoyer au patient

📁 Déplacer

Note : Vous pouvez visualiser le rapport DSA en cliquant sur la ligne du document que vous souhaitez afficher. Le document s’ouvrira alors dans un autre onglet.

8.2.18. Autres documents

Vous pouvez ajouter d’autres documents en cliquant sur « Importer un document » dans le bandeau de la fiche patient, vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page où vous pouvez choisir votre document à importer. Sélectionnez le type de document en cochant “Autre document”.

Vous avez la possibilité de partager ce fichier avec votre patient, pour se faire cocher la case “Envoyer au patient”.



Note : Vous pouvez importer des documents sous format PDF, jpeg, jpg et png.

Attention : Les documents PDF protégés par des mots de passe n'ont pas la possibilité d'être importés. Un message d'erreur s'affiche "Impossible de lire le PDF, vérifiez qu'il ne soit pas protégé par un mot de passe".

Les documents PDF ne doivent pas excéder 20 Mo.

Le document choisi s'affiche sur la droite.

Vous pouvez télécharger un document dans la catégorie « Autres documents » en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Télécharger ».

Vous pouvez aussi déplacer un document en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant « Déplacer ». En choisissant cette option, vous pouvez ensuite choisir une nouvelle catégorie parmi :

- Ordonnance,
- Compte rendu,
- Analyse biologique,
- DSA,
- Biopsie.

Vous pouvez envoyer un document à votre patient en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant "Envoyer au patient".

Attention : L'option "Envoyer au patient" n'apparaît pas si le patient n'a pas de compte, ou si le document a été importé par votre patient. Vous avez la possibilité d'envoyer uniquement les documents que vous avez importés.

Autres documents

 Bio6_page-0001.pdf 15 sept. 2021	...
 bio-analysis.pdf 27 juil. 2021	...
 Analyse.pdf 27 juil. 2021	...
 LAR REPORT 16 MR.pdf	...

↓ Télécharger


📧 Envoyer au patient

📁 Déplacer

Note : Vous pouvez visualiser le document en cliquant sur la ligne du document que vous souhaitez afficher. Le document s'ouvrira alors dans un autre onglet.

9. Gestion des analyses biologiques

Cliquez sur « Analyses biologiques » dans le menu principal de gauche pour afficher la liste des rapports d'analyse biologique que vous avez importés, ainsi que les rapports d'analyse biologique envoyés par les patients du service via l'Application Patient.

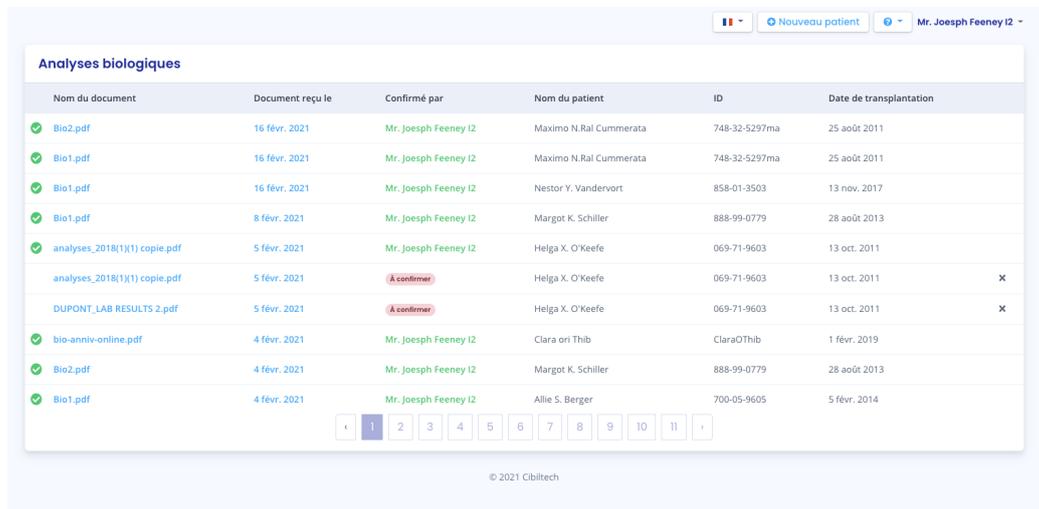


Nom du document	Document reçu le	Confirmé par	Nom du patient	ID	Date de transplantation	
Bio2.pdf	16 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Maximo N. Ral Cummerata	748-32-5297ma	25 août 2011	
Bio1.pdf	16 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Maximo N. Ral Cummerata	748-32-5297ma	25 août 2011	
Bio1.pdf	16 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Nestor Y. Vandervort	858-01-3503	13 nov. 2017	
Bio1.pdf	8 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Margot K. Schiller	888-99-0779	28 août 2013	
analyses_2018(1)(1) copie.pdf	5 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011	
analyses_2018(1)(1) copie.pdf	5 févr. 2021	À confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011	
DUPONT LAB RESULTS 2.pdf	5 févr. 2021	À confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011	
bio-anniv-online.pdf	4 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Clara ori Thib	ClaraOThib	1 févr. 2019	
Bio2.pdf	4 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Margot K. Schiller	888-99-0779	28 août 2013	
Bio1.pdf	4 févr. 2021	Mr. Joesph Feeney I2	Allie S. Berger	700-05-9605	5 févr. 2014	

Les rapports d'analyse biologique sont rangés par ordre antéchronologique : le rapport importé le plus récemment apparaît en premier.

La liste des documents contient les informations suivantes :


- Un logo indiquant si les données de l'analyse biologique ont été validées,
- Le nom du rapport d'analyse biologique,
- La date de réception du rapport d'analyse biologique,
- La personne qui a validé les données du rapport d'analyse biologique,
- Le patient auquel le rapport d'analyse biologique appartient,
- L'ID du patient,
- La date de transplantation du patient.

Vous avez la possibilité de supprimer une analyse biologique à partir de cette liste en cliquant sur la croix située à droite. Une fenêtre de confirmation apparaît alors.

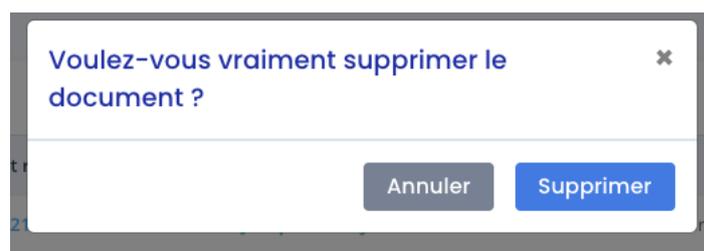

10. Gestion des analyses biologiques de « Mes patients »

Cliquez sur “Analyses - Mes patients” dans le menu principal de gauche pour afficher la liste des rapports d’analyse biologique de votre liste “Mes patients” que vous avez importés, ainsi que les rapports d’analyse biologique envoyés par les patients de votre liste “Mes patients” via l’application patient.

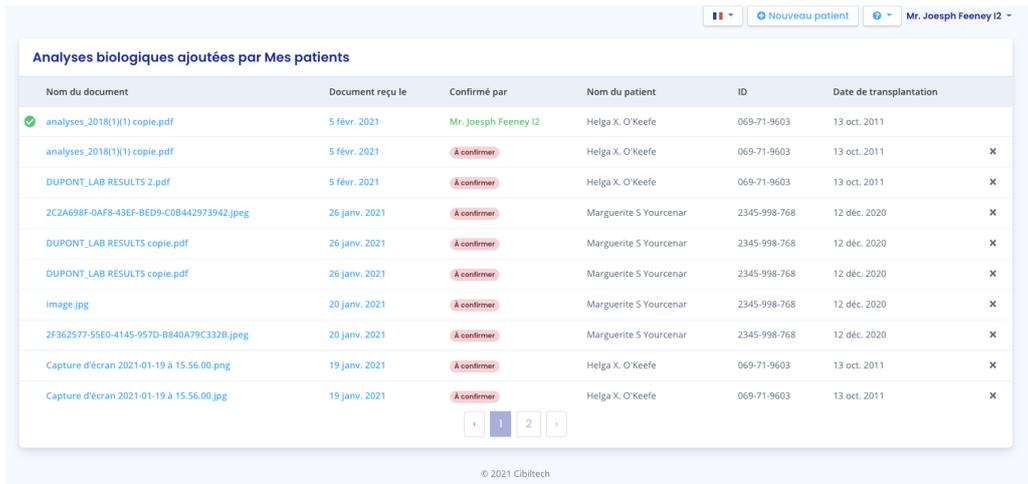

Nom du document	Document reçu le	Confirmé par	Nom du patient	ID	Date de transplantation
 analyses_2018(1)(1) copie.pdf	5 févr. 2021	Mr. Joseph Feeney I2	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011
analyses_2018(1)(1) copie.pdf	5 févr. 2021	A confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011 
DUPONT_LAB RESULTS 2.pdf	5 févr. 2021	A confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011 
2C2A698F-0AF8-43EF-BED9-C0B442973942.jpeg	26 janv. 2021	A confirmer	Marguerite S Yourcenar	2345-998-768	12 déc. 2020 
DUPONT_LAB RESULTS copie.pdf	26 janv. 2021	A confirmer	Marguerite S Yourcenar	2345-998-768	12 déc. 2020 
DUPONT_LAB RESULTS copie.pdf	26 janv. 2021	A confirmer	Marguerite S Yourcenar	2345-998-768	12 déc. 2020 
image.jpg	20 janv. 2021	A confirmer	Marguerite S Yourcenar	2345-998-768	12 déc. 2020 
2F362577-55E0-4145-957D-B840A79C332B.jpeg	20 janv. 2021	A confirmer	Marguerite S Yourcenar	2345-998-768	12 déc. 2020 
Capture d'écran 2021-01-19 à 15.56.00.png	19 janv. 2021	A confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011 
Capture d'écran 2021-01-19 à 15.56.00.jpg	19 janv. 2021	A confirmer	Helga X. O'Keefe	069-71-9603	13 oct. 2011 

Les rapports d’analyse biologique sont rangés par ordre antéchronologique : le rapport importé le plus récemment apparaît en premier.

La liste des documents contient les informations suivantes :

- Le nom du rapport d’analyse biologique,
- La date de réception du rapport d’analyse biologique,
- La personne qui a validé les données du rapport d’analyse biologique,
- Le patient auquel le rapport d’analyse biologique appartient,
- L’ID du patient,
- La date de transplantation du patient.

Vous avez la possibilité de supprimer une analyse biologique à partir de cette liste en cliquant sur la croix située à droite. Une fenêtre de confirmation apparaît alors.

11. Gestion de la liste des patients

Cliquez sur « Patients » dans le menu principal de gauche pour afficher la liste des patients du service. La liste contient les informations suivantes :

- Étoile cliquable pour ajouter le patient dans la liste “Mes patients”,
- Nom complet du patient et badge indiquant si le patient a une alerte,
- Date de naissance du patient,

- Numéro identifiant du patient (ID),
- Dernière date d'évaluation (date la plus récente de l'étape 2, DFG-e lors de la création d'une évaluation iBox),
- Date de transplantation,
- Compte patient (si le compte est activé, en attente ou non invité),
- Date de création de la fiche patient.

Au chargement de la page, la liste est ordonnée par la colonne "Dernière évaluation".

Patients								
Rechercher...							Mes Patients ☆	10 ▾
☆	Nom	Date de naissance	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Compte patient	Créé	
★	Roger R GERBI	28 juin 1950	045	20 sept. 2021	8 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021	
☆	Micheal ÓORDAN	4 mai 1974	9876	17 sept. 2021	4 mai 2018	Activé	12 mai 2021	
☆	Ryan COCHRANE	28 juil. 1980	045-222-056	16 sept. 2021	2 juil. 2020	Activé	28 juil. 2021	
☆	Coralie LEVY	24 juil. 1995	3847	16 sept. 2021	2 juin 2016	Activé	10 juin 2021	
★	Floriane DÚMANÉÉÍÓÉN	10 oct. 1996	8493	3 sept. 2021	4 sept. 2014	En attente	14 sept. 2021	
☆	Meta V. FAY	12 nov. 1978	669-75-5379	3 sept. 2021	25 déc. 2019	Non invité	18 déc. 2020	
☆	Mary Z. ROWN	1 oct. 1985	495-129-111	9 août 2021	4 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021	
☆	Gerard LAND	14 mai 1988	98787576970	4 juil. 2021	31 mai 2021	Activé	31 mai 2021	
★	Birttany MACLEAN	11 janv. 1991	045-444-999	28 juin 2021	1 juil. 2020	En attente	28 juil. 2021	
☆	Catherine ZETA-JONES	25 sept. 1969	095-959-023	12 juin 2021	11 mai 2018	Activé	31 mai 2021	

1 à 10 enregistrements sur 204

Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 21 Suivant

11.1. Rechercher

Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir :

- Tout ou partie du nom du patient,
- Tout ou partie d'un ID,
- Une date (correspondant aux colonnes "Dernière évaluation", "Date de transplantation", "Créé le") au format jj/mm/aaaa ou /mm ou /aaaa.

La liste des patients correspondant à la saisie s'affiche en appuyant sur la touche "Entrée" de votre clavier.

Note : La fonction recherche ne s'applique pas pour la colonne "Temps après Tx".

11.2 Ajouter des patients dans "Mes patients"

À partir de la liste des patients, vous pouvez cliquer sur ☆ pour ajouter le patient dans la liste "Mes patients".

Vous pouvez aussi cliquer sur ★ pour retirer le patient de la liste "Mes patients".

11.3 Filtre d'affichage

Cliquez sur pour modifier le nombre de patients affiché sur une page. Vous pouvez afficher 10, 25, 50 ou 100 patients.

11.4 Ordonner la liste

Cliquez sur l'en-tête de colonne pour modifier l'ordre d'affichage, ascendant ou descendant, de la liste. Cliquez une deuxième fois pour ordonner de manière contraire.

Exemple :

Ordonner de manière ascendante les noms.

Patients									
<input type="text" value="Rechercher..."/>								Mes patients ☆	<input type="text" value="10"/>
☆	Nom ▲	Date de naissance	ID	Covid-19	Dernière évaluation	Date de transplantation	Temps après Tx	Créé le	
☆	Lottie L. Abernathy	17 mai 1977	875-23-4362	Non testé	30 janv. 2019	13 avr. 2018	2 ans	7 déc. 2020	
☆	Julia K. Armstrong	27 mars 1985	156-59-6440	Non testé	24 sept. 2014	16 juin 2014	6 ans	7 déc. 2020	
☆	Dedric H. Auer	4 déc. 1968	078-69-2119	Non testé	6 mai 2015	24 janv. 2014	6 ans	7 déc. 2020	
★	Alexie I. Bayer	25 mai 1964	896-51-6088	Non testé	13 nov. 2018	3 janv. 2012	8 ans	7 déc. 2020	
☆	Tracy I. Beer	20 oct. 1958	671-22-1132	Non testé	25 mai 2013	4 nov. 2012	8 ans	7 déc. 2020	
★	 Ewell E. Bins	10 juil. 1981	439-94-0811	Non testé	28 juin 2020	27 août 2019	1 an	7 déc. 2020	
☆	Ahmed C. Blick	16 juin 1962	748-67-5565	Non testé	30 juin 2015	10 mai 2011	9 ans	7 déc. 2020	
☆	Christopher C. Bogisich	18 mars 1968	049-98-2886	Non testé	7 févr. 2016	31 mars 2014	6 ans	7 déc. 2020	
☆	Jacinto U. Boyer	11 janv. 1973	718-34-4758	Non testé	19 avr. 2017	3 août 2016	4 ans	7 déc. 2020	
☆	Justus O. Bradtke	26 févr. 1966	808-78-6051	Non testé		18 juin 2013	7 ans	7 déc. 2020	

1 à 10 enregistrements sur 112

Précédent Suivant

Un deuxième clic sur la colonne Nom permet d'ordonner la liste de manière descendante.

Patients							
Rechercher...							
Mes Patients ☆ 10							
☆	Nom	Date de naissance	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Compte patient	Créé
★	! Roger R GERBI	28 juin 1950	045	20 sept. 2021	8 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021
☆	! Micheal ÓORDAN	4 mai 1974	9876	17 sept. 2021	4 mai 2018	Activé	12 mai 2021
☆	! Ryan COCHRANE	28 juil. 1980	045-222-056	16 sept. 2021	2 juil. 2020	Activé	28 juil. 2021
☆	! Coralie LEVY	24 juil. 1995	3847	16 sept. 2021	2 juin 2016	Activé	10 juin 2021
★	! Floriane DÛMÃNÃÉÍÓËÑ	10 oct. 1996	8493	3 sept. 2021	4 sept. 2014	En attente	14 sept. 2021
☆	! Meta V. FAY	12 nov. 1978	669-75-5379	3 sept. 2021	25 déc. 2019	Non invité	18 déc. 2020
☆	Mary Z. ROWN	1 oct. 1985	495-129-111	9 août 2021	4 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021
☆	! Gerard LAND	14 mai 1988	98787576970	4 juil. 2021	31 mai 2021	Activé	31 mai 2021
★	Birttany MACLEAN	11 janv. 1991	045-444-999	28 juin 2021	1 juil. 2020	En attente	28 juil. 2021
☆	! Catherine ZETA-JONES	25 sept. 1969	095-959-023	12 juin 2021	11 mai 2018	Activé	31 mai 2021

1 à 10 enregistrements sur 204

Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 10 Suivant

11.5 Parcourir la liste

Pour parcourir la liste, cliquez sur un des numéros, "Précédent" ou "Suivant".

Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 10 Suivant

12. Gestion de la liste « Mes patients »

Cliquez sur « Mes Patients » dans le menu principal de gauche pour afficher la liste des patients avec . La liste contient les informations suivantes :

- Étoile cliquable pour retirer le patient de la liste "Mes patients",
- Nom complet du patient,
- Date de naissance du patient,
- Numéro identifiant du patient (ID),
- Dernière date d'évaluation (date la plus récente de l'étape 2, DFG-e lors de la création d'une évaluation iBox),
- Date de transplantation,
- Compte patient (si le compte est activé, en attente ou non invité), Date de création de la fiche patient.

Mes patients

Rechercher...

10

Nom	Date de naissance	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Compte patient	Créé
★  Roger R GERBI	28 juin 1950	045	20 sept. 2021	8 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021
★  Floriane DÚMÀNÈÉÍÓĚŃ	10 oct. 1996	8493	3 sept. 2021	4 sept. 2014	En attente	14 sept. 2021
★ Birttany MACLEAN	11 janv. 1991	045-444-999	28 juin 2021	1 juil. 2020	En attente	28 juil. 2021
★  Sunny O. ABERNATHY	24 oct. 1969	895-44-0241	6 nov. 2020	14 nov. 2015	Activé	18 déc. 2020
★  Oma F. REINGER	31 mars 1967	271-25-4043	13 mai 2020	28 mai 2016	Activé	18 déc. 2020
★  Lucas Luc LEF	8 mai 1990	12345678	8 avr. 2020	6 mai 2018	En attente	11 mai 2021

1 à 6 enregistrements sur 6 (filtré parmi 204)

Précédent 1 Suivant

Note : Dès lors que certains de vos patients sont ajoutés dans cette liste, vous serez redirigé automatiquement sur cette liste lors de votre connexion à Predigraft.

12.1 Filtre d'affichage

Cliquez sur pour modifier le nombre de patients affiché sur une page. Vous pouvez afficher 10, 25, 50 ou 100 patients.

12.2 Ordonner la liste

Cliquez sur l'en-tête de colonne pour modifier l'ordre d'affichage, ascendant ou descendant, de la liste.

Exemple :

Ordonner de manière ascendante les noms.

Mes patients

Rechercher...

10

Nom	Date de naissance	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Compte patient	Créé
★  Roger R GERBI	28 juin 1950	045	20 sept. 2021	8 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021
★  Floriane DÚMÀNÈÉÍÓĚŃ	10 oct. 1996	8493	3 sept. 2021	4 sept. 2014	En attente	14 sept. 2021
★ Birttany MACLEAN	11 janv. 1991	045-444-999	28 juin 2021	1 juil. 2020	En attente	28 juil. 2021
★  Sunny O. ABERNATHY	24 oct. 1969	895-44-0241	6 nov. 2020	14 nov. 2015	Activé	18 déc. 2020
★  Oma F. REINGER	31 mars 1967	271-25-4043	13 mai 2020	28 mai 2016	Activé	18 déc. 2020
★  Lucas Luc LEF	8 mai 1990	12345678	8 avr. 2020	6 mai 2018	En attente	11 mai 2021

1 à 6 enregistrements sur 6 (filtré parmi 204)

Précédent 1 Suivant

Un deuxième clic sur la colonne Nom permet d'ordonner la liste de manière descendante.

Mes patients

Rechercher... 10

Nom	Date de naissance	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Compte patient	Créé
★  Roger R GERBI	28 juin 1950	045	20 sept. 2021	8 avr. 2020	Activé	28 avr. 2021
★  Floriane ΔÚΜΑΝΕΪΌΈÑ	10 oct. 1996	8493	3 sept. 2021	4 sept. 2014	En attente	14 sept. 2021
★ Birttany MACLEAN	11 janv. 1991	045-444-999	28 juin 2021	1 juil. 2020	En attente	28 juil. 2021
★  Sunny O. ABERNATHY	24 oct. 1969	895-44-0241	6 nov. 2020	14 nov. 2015	Activé	18 déc. 2020
★  Oma F. REINGER	31 mars 1967	271-25-4043	13 mai 2020	28 mai 2016	Activé	18 déc. 2020
★  Lucas Luc LEF	8 mai 1990	12345678	8 avr. 2020	6 mai 2018	En attente	11 mai 2021

1 à 6 enregistrements sur 6 (filtré parmi 204) Précédent **1** Suivant

12.4 Parcourir la liste

Pour parcourir la liste, cliquez sur un des numéros, “Précédent” ou “Suivant”.

Précédent **1** 2 3 4 5 6 ... 10 Suivant


13. Gestion de la messagerie

Vous pouvez aussi accéder à la messagerie à partir du menu « Messagerie ». Cliquez sur « Messagerie » dans le menu à gauche.



Lorsqu'un de vos patients vous envoie un message, une pastille rouge dans le menu "Messagerie" apparaît. Ce compteur énumère le nombre de conversations non lues. Un deuxième compteur bleu apparaît dans chacune de vos conversations non lues et vous permet de connaître le nombre de messages non lus par conversation. Ainsi, lorsque vous lisez un message initialement non lu, la pastille rouge descend d'un point.


Attention : Si un patient vous envoie 5 messages, la pastille rouge prend seulement en compte la conversation non lue et non le nombre de messages non lus. Les messages non lus par conversation seront indiqués par une pastille bleue à côté de la conversation. L'ajout d'un poids ou d'une pression artérielle par votre patient n'est pas considéré comme une notification. La pastille rouge n'est donc déclenchée uniquement par un nouveau message ou un nouveau document envoyé par votre patient.

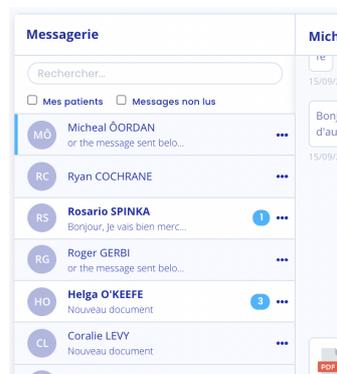

La conversation la plus récente s'affiche. Vous pouvez accéder à toutes les conversations de vos patients ayant un compte Predigraft activé, même ceux avec qui vous n'avez encore jamais échangé.

Vous pouvez afficher seulement les conversations de vos patients présents dans la liste « Mes patients » en cochant la case « Mes patients ».

Note : Le filtre « Mes patients » est activé par défaut.

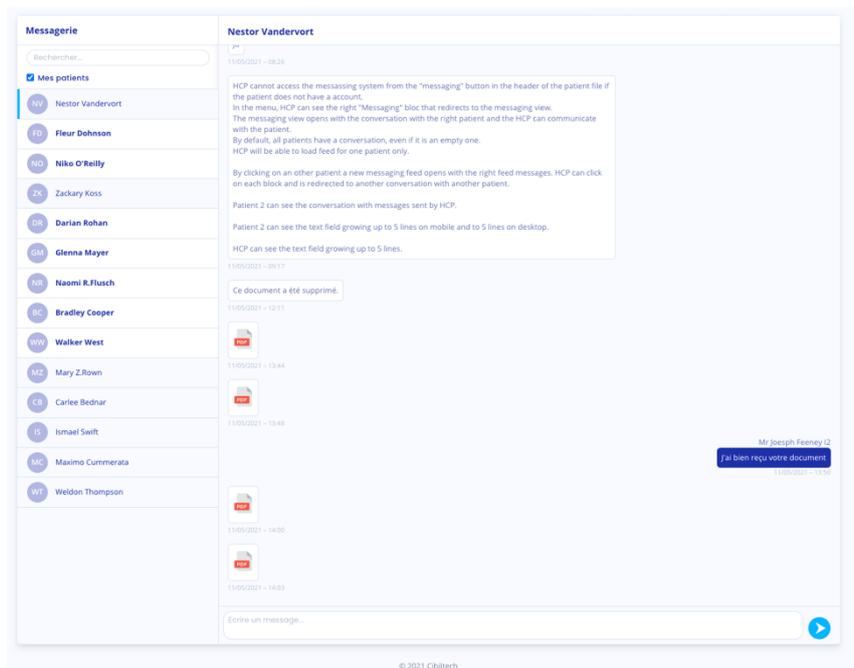

Pour changer de conversation, cliquez sur le nom du patient souhaité. Une barre bleue apparaît alors sur le côté précisant que vous êtes bien sur la conversation.

Vous avez aussi la possibilité de rechercher un patient en cliquant sur la barre de recherche en haut à gauche de votre messagerie.

Lorsque le nom du patient apparaît en gras, cela signifie que vous avez un message non lu. Lorsque vous cliquez dessus, le nom du patient n'apparaît plus en gras.

Note : Les conversations sont rangées du message le plus récent au plus ancien.

Note : Vous pouvez visualiser un document en cliquant sur l'icône du document que vous souhaitez afficher. Le document s'ouvrira alors dans un nouvel onglet.

14. Génération d'une évaluation iBox

Pour créer une évaluation iBox, depuis la liste des patients, sélectionnez un patient pour ouvrir sa fiche.

Si votre patient a un compte sur l'application patient Predigraft et qu'il a envoyé des documents d'analyse biologique ou si vous avez importé des documents d'analyse biologique, vous pouvez visualiser un de ces documents :

- Depuis la fiche patient, dans l'élément "Analyses biologiques", cliquez sur le document que vous souhaitez visualiser.

Pour générer une nouvelle évaluation iBox, cliquez sur le bouton "Nouvelle évaluation iBox" de l'élément Surveillance/Évaluation du risque. Vous arrivez ensuite sur la page "Nouvelle évaluation iBox".

Surveillance / Evaluation du risque		+ Nouvelle évaluation iBox		
Date	Données	3 ans	5 ans	7 ans
2 févr. 2021	 	97 %	95 %	93 %
5 août 2019	 	19 %	6 %	2 %

Vous pouvez également générer une nouvelle évaluation iBox depuis le tableau biologique. Pour ce faire, cliquez sur "Tableau biologique", puis sur le bouton "Nouvelle évaluation iBox" situé en haut à droite du tableau.

Helga X. O'Keefe (069-71-9603)
 Homme, 64 ans né le 31 janv. 1957, transplanté le 13 octobre 2011 (il y a 9 ans) ← Retour

Tableau biologique + Nouvelle Evaluation iBox

■ Sang ■ Urine

14.1 Création d'une évaluation iBox

Remplissez le formulaire étape par étape en s'assurant que les champs obligatoires sont renseignés pour passer à l'étape suivante.

1. Valeur de débit de filtration glomérulaire estimé (DFG-e),
2. Valeur de protéinurie,
3. Valeur de DSA si disponible, si non cochez "Non disponible",
4. Informations d'histologie si disponible, si non cochez "Non disponible".

Si vous avez choisi de créer une évaluation iBox pour un patient qui n'a pas de rapports d'analyse biologique importés, cliquez sur "Non disponible" dans la liste de menu déroulant :

Pour les étapes 1 et 2, vous pouvez renseigner les informations suivantes du patient :

- DFG-e,
- Protéinurie.

Pour l'étape 3, vous renseignez les informations de DSA du patient. Si vous ne possédez pas ces informations, vous pouvez cocher la case "Non disponible".

Pour l'étape 4, vous pouvez cliquer dans le champ vide de la partie gauche de la création de rapport si vous souhaitez importer un rapport d'histologie depuis votre ordinateur et le visualiser à côté du formulaire. Vous pouvez enregistrer le rapport d'histologie dans la fiche patient. Ensuite, vous pouvez renseigner les informations d'histologie du patient. Si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez cocher la case "Non disponible".

Si vous avez choisi de créer une évaluation iBox pour un patient qui a des rapports d'analyse biologique importés :


Pour les étapes 1 et 2, le document d'analyse biologique s'affiche sur la partie gauche de la création de rapport. Vous pouvez renseigner les informations suivantes du patient :

- DFG-e,
- Protéinurie.

Attention : Le rapport d'analyse biologique, dont la date est la plus récente, s'affiche par défaut. Pour choisir un autre rapport, veuillez cliquer sur la flèche, un menu déroulant s'affiche avec tous les rapports d'analyse biologique relatifs au patient.

Note : Les rapports d'analyses biologiques que vous pouvez afficher sont les rapports dont les données extraites à l'import ont été validés. Si vous avez validé les données suivantes, ces dernières seront déjà pré-remplies automatiquement lors des étapes 1 et 2 de la création de l'évaluation iBox :

- La date de DFG,
- Le DFG estimé,
- Le taux de créatinine dans le sang,
- La date de protéinurie,
- Le ratio protéine / créatinine dans les urines
- Le taux de créatinine dans les urines,
- Le taux de protéines dans les urines.

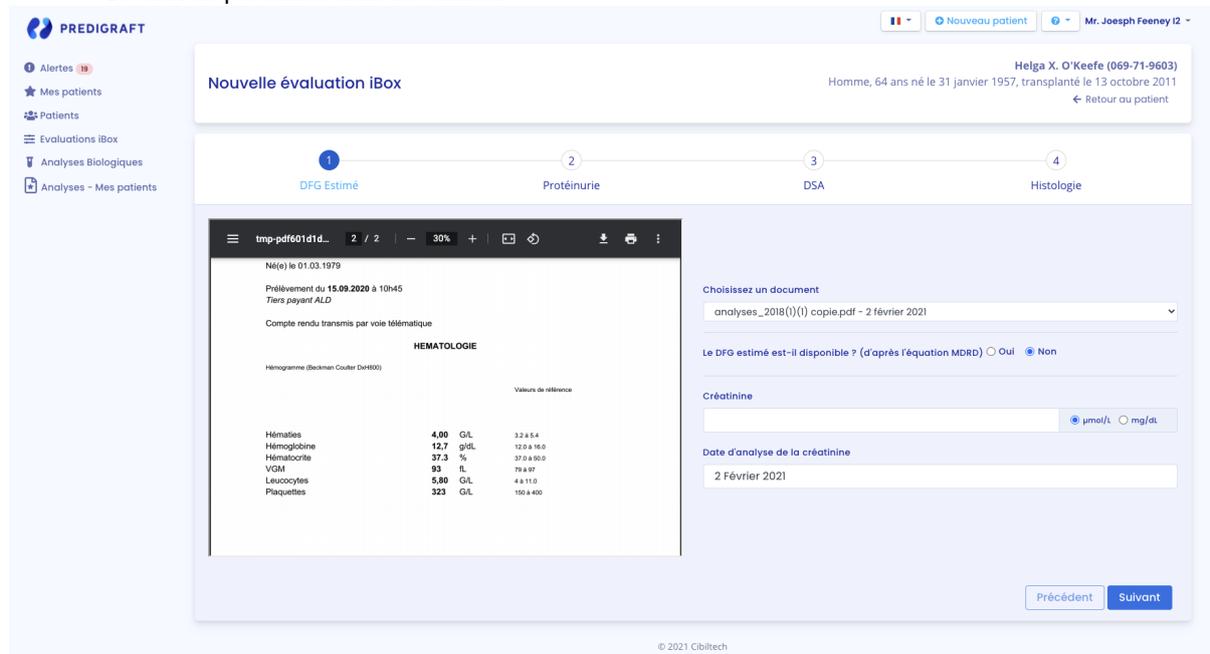

HEMATOLOGIE

			Valeurs de référence
Hématies	4,00	G/L	3,2 à 5,4
Hémoglobine	12,7	g/dL	12,0 à 16,0
Hématocrite	37,3	%	37,0 à 50,0
VGM	93	fL	79 à 97
Leucocytes	5,90	G/L	4,8 à 11,0
Plaquettes	323	G/L	150 à 400

Pour l'étape 3, vous renseignez les informations de DSA en votre possession concernant le patient. Si vous ne possédez pas ces informations, vous pouvez cocher la case "Non disponible".

Pour l'étape 4, vous pouvez cliquer dans le champ vide de la partie gauche de la création de rapport si vous souhaitez importer un rapport d'histologie depuis votre ordinateur et le visualiser à côté du formulaire. Vous pouvez enregistrer le rapport d'histologie sur la fiche patient. Ensuite, vous pouvez renseigner les informations d'histologie du patient. Si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez cocher la case "Non disponible".

- **Dates**

Les dates des étapes 1, 2, 3 et 4 sont obligatoires. Elles ne peuvent pas être antérieures à la date de transplantation. Afin de vous aider dans la saisie de cette information, vous avez accès à un calendrier où vous pouvez cliquer sur la date correspondante :


Lors de la 1ère étape, vous pouvez cliquer sur :

- Une date du calendrier,
- Le bouton "Aujourd'hui".




Lors des étapes 2, 3 et 4, vous pouvez cliquer sur :


- Une date du calendrier,
- Le bouton "Aujourd'hui",
- Le bouton "Date de DFG/créatinine" (date de la 1ère étape).

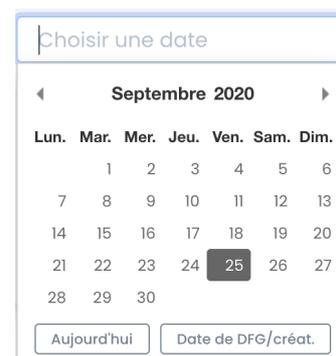



Les captures d'écran suivantes montrent les étapes de création d'une évaluation iBox sans visualisation de rapports de biologie.

Bandeau de titre	<p>Le bandeau de titre est disponible sur toutes les pages de création de rapport.</p> <div data-bbox="448 293 1385 371" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Nouvelle évaluation iBox Helga X. O'Keefe (069-71-9603) Homme, 64 ans né le 31 janvier 1957, transplanté le 13 octobre 2011 ← Retour au patient</p> </div> <p>Vous visualisez les informations patient suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nom, - ID, - Sexe, - Age et date de naissance, - Date de transplantation.
1) Valeur de débit de filtration glomérulaire estimé (DFG-e)	<p><u>Choix 1 :</u> La valeur de DFG estimée doit être comprise entre 0 et 500. Au-delà de 120, un message vous informe que le calcul iBox se fera avec un DFG égal à 120. Message d'avertissement : " Êtes-vous sûr que le DFG estimé est au-dessus de 120mL/min/1,73m² ? Le calcul iBox utilisera un DFG égal à 120 mL/min/1,73m²." Message d'erreur : "Le DFG estimé doit être compris entre 0 et 500".</p> <div data-bbox="448 831 1385 1155" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">1 DFG Estimé 2 Protéinurie 3 DSA 4 Histologie</p> <p>Le DFG estimé est-il disponible ? (d'après l'équation MDRD) <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>Date d'analyse du DFG estimé Choisir une date</p> <p>Valeur du DFG estimé par l'équation MDRD Entre 0 et 300 <input type="text"/> mL/min/1,73m²</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Suivant"/></p> </div> <p><u>Choix 2 :</u></p> <div data-bbox="448 1245 1385 1570" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">1 DFG Estimé 2 Protéinurie 3 DSA 4 Histologie</p> <p>Le DFG estimé est-il disponible ? (d'après l'équation MDRD) <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non</p> <p>Créatinine <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> µmol/L <input type="radio"/> mg/dL</p> <p>Date d'analyse de la créatinine Choisir une date</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Suivant"/></p> </div> <p>Predigraft applique la formule MDRD à partir de la créatinine. La valeur de créatinine est limitée : Message d'erreur : « La valeur de créatinine doit être entre 1 et 1300 µmol/L. » Message d'erreur : « La valeur de créatinine doit être entre 0.02 et 33.92 mg/dL. »</p> <p>Le DFG est calculé : Message de succès : "Le DFG estimé est <valeur> mL/min/1,73m² d'après l'équation MDRD" ou si le DFG est compris entre 120 et 500 : "Le DFG estimé est <valeur> mL/min/1,73m² d'après</p>

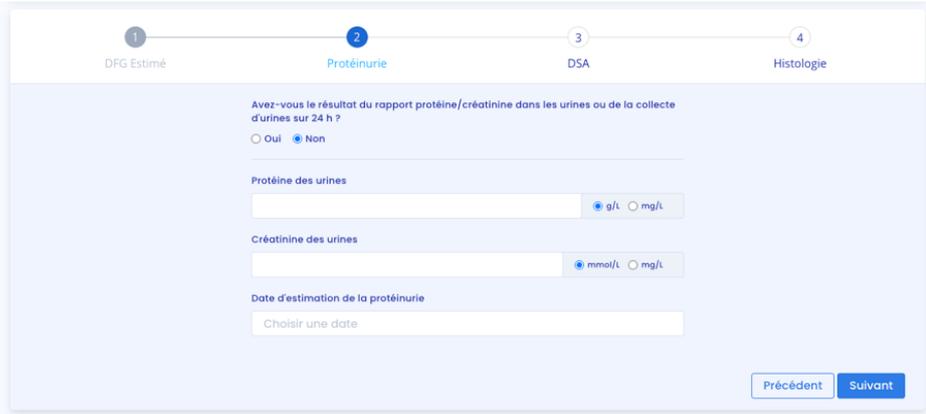	<p>l'équation MDRD. Le calcul iBox utilisera un DFG estimé égal à 120 mL/min/1,73m² “.</p> <p>Message d'erreur : « Le DFG estimé est supérieur à 500 mL/min/1,73m². »</p> <p>Message d'erreur : « Le DFG estimé est inférieur à 0 mL/min/1,73m². »</p> <p>Notes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La limite supérieure de 500 mL/min/1,73m² existe pour prendre en compte les cas extrêmes. - La limite de 120 mL/min/1,73m² pour calculer le résultat iBox a été établie car le calcul des probabilités iBox et le bénéfice de survie attendu à 3, 5, 7 ans sont inchangés au-delà de 120 mL/min/1,73m².
<p>2) Valeur de protéinurie</p>	<p><u>Choix 1 :</u></p>  <p>La valeur de protéinurie doit être comprise entre 0 et 12.</p> <p>Message d'erreur : “La protéinurie doit être comprise entre 0 et 12 g/g.”</p> <p><u>Choix 2 :</u></p>  <p>Predigraft calcule la protéinurie par le ratio de protéines des urines sur la créatinine des urines.</p> <p>La protéine des urines est limitée :</p>

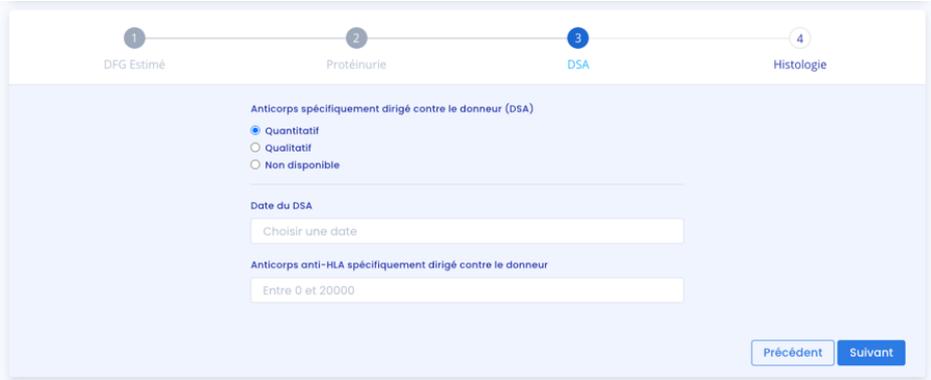
	<p>Message d'erreur :</p> <p>"La valeur de protéinurie doit être comprise entre 0 et 30 g/L." ou "La valeur de protéinurie doit être comprise entre 0 et 30000 mg/L."</p> <p>La créatinine des urines est limitée :</p> <p>Message d'erreur :</p> <p>"La valeur de créatinine doit être comprise entre 0 et 35 mmol/L." ou "La valeur de créatinine doit être comprise entre 0 et 3959.27 mg/L."</p> <p>Le ratio est calculé :</p> <p>Message de succès : "Le rapport protéine/créatinine dans les urines est <valeur> g/g."</p> <p>Message d'erreur : "Le rapport protéine/créatinine dans les urines ne doit pas dépasser 12 g/g"</p> <p>Message d'erreur : "Le rapport protéine/créatinine dans les urines ne peut pas être négatif."</p> <p>Note sur la date de protéinurie :</p> <p>Predigraft recommande de mesurer le DFG et la protéinurie à 15 jours d'intervalle.</p> <p>Message d'avertissement : "Le délai entre le DFG estimé et la protéinurie est supérieur aux 15 jours recommandés".</p> <p>Message d'erreur : "Le délai entre le DFG estimé et la protéinurie est supérieur à 30 jours"</p>
<p>3) Valeur de DSA</p>	<p><u>Choix 1 :</u></p>  <p>La valeur d'anticorps anti-HLA doit être comprise entre 0 et 20000.</p> <p>Message d'erreur : "Le MFI doit être compris entre 0 et 20000."</p> <p><u>Choix 2 :</u></p>

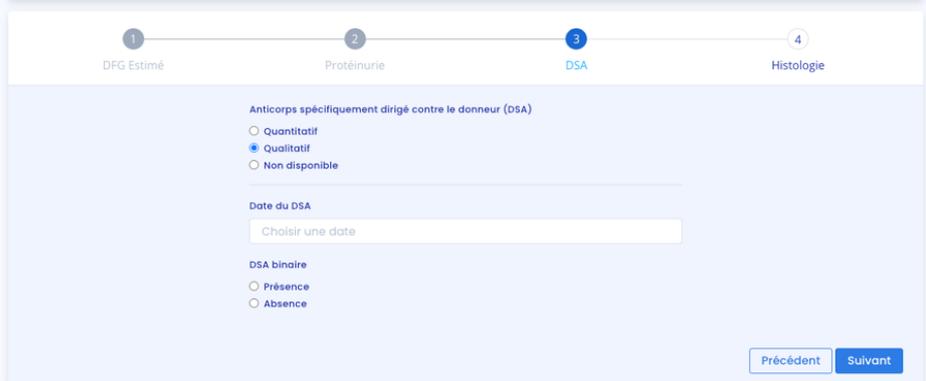	 <p>Vous devez sélectionner “Présence” ou “Absence”.</p> <p><u>Choix 3 :</u></p>  <p>Note sur la date de DSA : Predigraft recommande de mesurer le DFG et le DSA à 2 mois d’intervalle. Message d’avertissement : “Le délai entre le DFG estimé et le DSA est supérieur aux 2 mois recommandés”. Message d’erreur : “Le délai entre le DFG estimé et le DSA est supérieur à 4 mois”.</p>
<p>4) Informations d’histologie</p>	<p>Vous pouvez importer un rapport d’histologie pour le visualiser. Une fois le rapport d’histologie visible, vous pouvez décider de l’enregistrer dans la fiche patient.</p> <p><u>Choix 1 :</u></p>

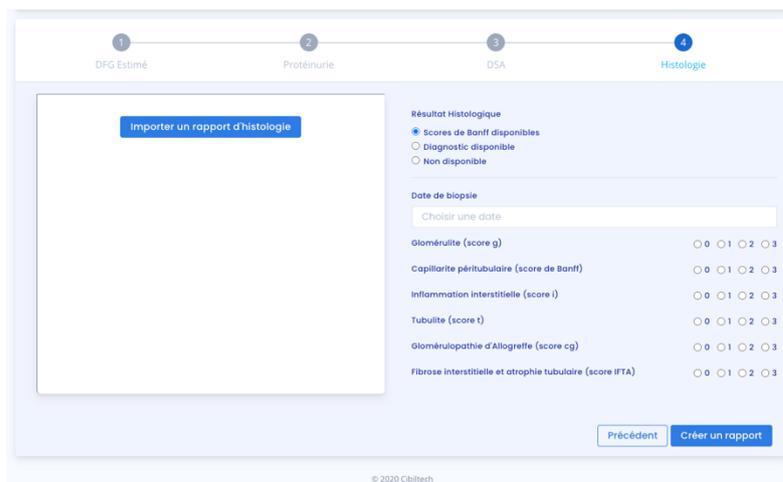

Vous devez sélectionner "0", "1", "2" ou "3" pour chaque score de Banff.

Choix 2 :

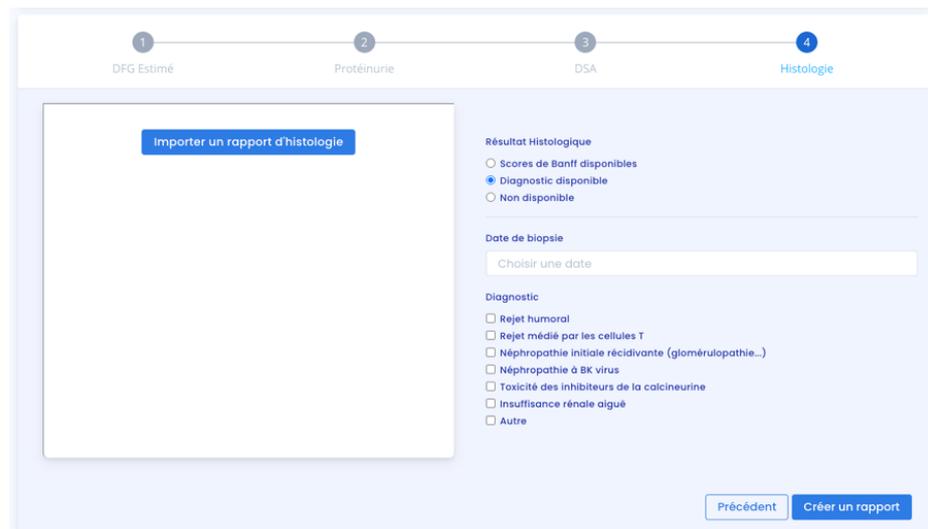

Vous devez sélectionner au moins un diagnostic.

Le choix "Autre" correspond à tout autre diagnostic dont "Sain".

Choix 3 :

1 DFG Estimé
2 Protéinurie
3 DSA
4 Histologie

Importer un rapport d'histologie

Résultat Histologique

Scores de Banff disponibles
 Diagnostic disponible
 Non disponible

Précédent
Créer un rapport

Note sur la date d'histologie :
 Predigraft recommande de mesurer le DFG et l'histologie à 2 mois d'intervalle.
 Message d'erreur : "Le délai entre le DFG estimé et la biopsie doit être inférieur à 2 mois".

Predigraft choisit le modèle algorithmique iBox correspondant aux données d'entrées. Le bouton "Créer un rapport" vérifie l'absence d'erreurs dans les données entrées. L'évaluation iBox générée contient les résultats du calcul de l'algorithme iBox : probabilité de survie à 3, 5 et 7 ans post date d'évaluation (date de l'étape 1).

14.2 Visualisation des résultats

Le bandeau de titre rappelle le nom du patient, la date d'évaluation (date de l'étape 1) DFG-e), la date de transplantation du patient.

Evaluation iBox de Helga X. O'Keefe
Réservé à la Recherche

Télécharger le fichier associé
Imprimer
Supprimer

Date d'évaluation	2 février 2021 (111.7 mois post-greffe)
Date de transplantation	13 octobre 2011

Vous pouvez imprimer l'évaluation iBox en cliquant sur "Imprimer".

Si vous avez créé l'évaluation iBox en pré visualisant un rapport d'analyse biologique, vous pouvez télécharger le rapport d'analyse biologique.

Vous pouvez supprimer le rapport en cliquant sur "Supprimer" et en précisant la raison dans la fenêtre de confirmation qui apparaît :

- Des données sont erronées,

- Le patient n'est pas le bon,
- Ce rapport est un doublon.

Vous visualisez les résultats du calcul iBox : la probabilité de survie du greffon rénal projetée à 3 ans, 5 ans et 7 ans à partir de la date d'évaluation. Le panneau « Commentaire » décrit les probabilités.



Vous visualisez les résultats de l'iBox du rapport actuel comparé aux résultats du précédent rapport (dont la date d'évaluation est antérieure et la plus proche). Le panneau « Commentaire » décrit si les probabilités de survie sont meilleures ou moins bonnes depuis le précédent rapport.



Vous visualisez les données d'entrée qui ont permis de générer le rapport : la date et la valeur de chaque étape de création du rapport (DFG estimé, Protéinurie, DSA, Histologie). Dans le panneau « Commentaire », vous retrouvez la probabilité de concordance du modèle iBox utilisé compte-tenu des données d'entrées (c-stat). Vous pouvez cliquer sur le lien « publication » pour accéder à la publication de Paris Transplant Group concernant l'iBox.

Données		HISTOLOGIE	
DFG ESTIMÉ		Diagnostic	
DFG	20.0 mL/min/1,73m ²	• Néphropathie initiale récidivante (glomérulopathie...)	
Date de DFG	1 oct. 2020	• Insuffisance rénale aiguë	
PROTÉINURIE		Date de biopsie	1 oct. 2020
Protéinurie	12 g/g de créatinine		
Date de prot.	1 oct. 2020		
DSA			
MFI	2000		
Date du DSA	1 oct. 2020		

Commentaire

D'après les données d'entrée fournies, la performance du modèle a une C-stat de 0.806.

Les données ont été calculées en utilisant l'algorithme iBox décrit dans cette [publication](#) de Paris Transplant Group.

-

14.3 Génération d'iBox automatique

Vous avez la possibilité de créer des évaluations iBox manuellement, mais aussi automatiquement. En effet, le score de l'iBox étant calculé grâce à la protéinurie et la DFG, le calcul peut se faire automatiquement par l'équation MDRD.

Ainsi, pour chaque nouveau rapport créatinine des urines et protéine des urines ou à chaque nouvelle valeur de protéinurie que vous rentrerez sur la fiche de votre patient, un nouveau rapport iBox sera créé automatiquement. En revanche ce nouveau rapport sera créé uniquement si une valeur de DFG estimée est déjà présente sur la fiche de votre patient et date de moins d'un mois.

De même, pour chaque valeur de créatinine ou DFG estimée rentrée sur la fiche de votre patient, un nouveau rapport iBox sera créé automatiquement, uniquement si une valeur de protéinurie est déjà présente sur la fiche de votre patient et date de moins d'un mois.

Note : Chaque rapport sera affiché au même endroit que les rapports créés manuellement et seulement un rapport par jour sera généré en cas de plusieurs nouvelles données.

15. Gestion de la liste des évaluations iBox

Cliquez sur « Évaluations iBox » dans le menu principal de gauche pour afficher la liste des évaluations relatives aux patients du service. La liste contient les informations suivantes :

- Rapport : rapport de <nom complet du patient> (né(e) le <date de naissance du patient>),
- Date d'évaluation : date de l'étape 2) "DFG estimé" lors de la création du rapport,
- Temps après Tx : temps entre la date de transplantation et la date d'évaluation,

- 3 ans, 5 ans, 7 ans : probabilité de survie du greffon rénal à 3 ans, 5 ans, 7 ans après la date d'évaluation,
- Créé le : date de création du rapport.

Au chargement de la page, la liste est ordonnée par la colonne Date d'évaluation.

Evaluations iBox						
<input type="text" value="Rechercher..."/> 10						
Rapport	Date d'évaluation	Temps après Tx	3 ans	5 ans	7 ans	Créé le
Rapport de Weldon J. Thompson (né(e) le 10 déc. 1955)	4 févr. 2021	9 ans	60 %	44 %	28 %	11 févr. 2021
Rapport de Weldon J. Thompson (né(e) le 10 déc. 1955)	4 févr. 2021	9 ans	58 %	42 %	27 %	4 févr. 2021
Rapport de Maximo N.Ral Cummerata (né(e) le 10 nov. 1968)	3 févr. 2021	9 ans	88 %	82 %	74 %	3 févr. 2021
Rapport de Helga X. O'Keefe (né(e) le 31 janv. 1957)	2 févr. 2021	9 ans	89 %	83 %	75 %	16 févr. 2021
Rapport de Nestor Y. Vandervort (né(e) le 10 août 1980)	2 févr. 2021	3 ans	97 %	95 %	93 %	4 févr. 2021
Rapport de Weldon J. Thompson (né(e) le 10 déc. 1955)	2 févr. 2021	9 ans	58 %	42 %	27 %	4 févr. 2021
Rapport de Margot K. Schiller (né(e) le 16 mars 1962)	18 janv. 2021	7 ans	88 %	82 %	75 %	4 févr. 2021
Rapport de Maximo N.Ral Cummerata (né(e) le 10 nov. 1968)	12 janv. 2021	9 ans	88 %	82 %	75 %	12 janv. 2021
Rapport de Margot K. Schiller (né(e) le 16 mars 1962)	6 janv. 2021	7 ans	42 %	25 %	13 %	7 janv. 2021
Rapport de Delaney J. Carroll (né(e) le 9 janv. 1971)	16 déc. 2020	1 an	21 %	8 %	2 %	18 déc. 2020

1 à 10 enregistrements sur 389

Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 39 Suivant

15.1 Rechercher

Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir :

- Tout ou partie du nom du patient
- Une date correspondant aux colonnes "Date d'évaluation", "Temps après Tx", "Créé le" au format jj/mm/aaaa ou /mm ou /aaaa

La liste des rapports correspondant à la saisie s'affiche en appuyant sur la touche "Entrée" de votre clavier.

15.2 Filtre d'affichage

Cliquez sur pour modifier le nombre de rapports affichés sur une page. Vous pouvez afficher 10, 25, 50 ou 100 rapports.

15.3 Ordonner la liste

Cliquez sur l'en-tête de colonne pour modifier l'ordre d'affichage, ascendant ou descendant, de la liste.

15.4 Parcourir la liste

Pour parcourir la liste, cliquez sur un des numéros, "Précédent" ou "Suivant".

16. Alertes

16.1 Définition des alertes

Predigraft calcule les alertes des patients :

- Alertes de poids lorsque vous ajoutez une donnée de poids dans le dossier du patient
- Alertes de pression artérielle lorsque vous ajoutez une donnée de pression artérielle dans le dossier du patient
- Alertes sur les médicaments immunosuppresseurs lorsque vous renseignez des valeurs de T₀ Tacrolimus, T₂ Ciclosporine, T₀ Everolimus ou T₀ Sirolimus lors de la validation des données extraites suite à l'import d'un document d'analyse biologique
- Alertes sur la fonction rénale lorsque vous renseignez des valeurs de DFG estimé et de protéinurie lors de la création d'une évaluation iBox
- Alertes de probabilité de survie du greffon rénal lors de la création d'une évaluation iBox.

16.2 Paramétrage des alertes

Predigraft calcule les alertes de patients en fonction des paramètres d'alerte. Il existe trois niveaux de paramètres :

- (Par défaut) Niveau de Predigraft : Cibiltech définit les valeurs par défaut
- Niveau du service : le propriétaire du service peut modifier les paramètres d'alerte du service. Ce paramétrage est alors valable pour tous les patients du service.
- Niveau du patient : les membres du service peuvent modifier les paramètres d'alerte de chaque patient. Ce paramètre n'est valable que pour le patient concerné.

16.2.1 Paramétrage de Cibiltech : paramétrage par défaut

Au niveau de Predigraft, Cibiltech a défini des valeurs par défaut que les services peuvent modifier dès la prise en main.

1) Pression artérielle :

- Valeur de pression systolique maximale : 140 mmHg.
- Valeur de pression diastolique maximale : 90 mmHg.
- Valeur de pression systolique pour l'hypertension (Grade 3) : 180 mmHg.
- Valeur de pression diastolique pour l'hypertension (Grade 3) : 110 mmHg.

Les valeurs maximales pour chaque paramètre sont :

- Valeur de pression systolique maximale : 250 mmHg
- Valeur de pression diastolique maximale : 130 mmHg

2) Poids

- Gain de poids : 1 kg.
- Perte de poids en un mois : 5 %.
- Perte de poids en six mois : 10 %

Les valeurs maximales pour chaque paramètre sont :

- Gain de poids : 20 kg

3) Médicaments immunosuppresseurs

- T0 Tacrolimus seuil minimum : 4 ng/mL
- T0 Tacrolimus seuil maximum : 12 ng/mL
- T2 Ciclosporine seuil minimum : 600 ng/mL
- T2 Ciclosporine seuil maximum : 1 200 ng/mL
- T0 Everolimus seuil minimum : 3 ng/mL
- T0 Everolimus seuil maximum : 8 ng/mL
- T0 Sirolimus seuil minimum : 4 ng/mL
- T0 Sirolimus seuil maximum : 12 ng/mL

Les valeurs maximales pour chaque paramètre sont :

- T0 Tacrolimus seuil minimum : 12 ng/mL
- T0 Tacrolimus seuil maximum : 13 ng/mL
- T2 Ciclosporine seuil minimum : 1 000 ng/mL
- T2 Ciclosporine seuil maximum : 1 500 ng/mL
- T0 Everolimus seuil minimum : 12 ng/mL
- T0 Everolimus seuil maximum : 13 ng/mL
- T0 Sirolimus seuil minimum : 12 ng/mL
- T0 Sirolimus seuil maximum : 13 ng/mL

4) Données biologiques sanguines

- Potassium minimum: 3.2 mmol/L
- Potassium maximum: 5.3 mmol/L
- Hémoglobine minimum: 10 g/dL
- Hémoglobine maximum: 16.5 g/dL
- HbA1c minimum: 4.5 %
- HbA1c maximum: 9 %
- Plaquettes minimum: 80 000 /mm³
- Plaquettes maximum: 550 000 /mm³
- Neutropénie (polynucléaire neutrophiles minimum) : 1 000 /mm³
- Troponine maximum: 0.6 µg/L
- INR minimum: 1
- INR maximum: 5

Les seuils acceptés pour chaque paramètre sont :

- Potassium minimum: [3 - 3.5] mmol/L
- Potassium maximum: [4.8 - 5.5] mmol/L
- Hémoglobine minimum: [8.5 - 10] g/dL
- Hémoglobine maximum: [16 - 17.5] g/dL
- HbA1c minimum: [4 - 6] %
- HbA1c maximum: [6.5 - 13.5] %

- Plaquettes minimum: [10 000 - 150 000] /mm³
- Plaquettes maximum: [550 000 - 1 000 000] /mm³
- Neutropénie (polynucléaire neutrophiles minimum) : [500 - 1 000] /mm³
- Troponine maximum: [0.6 - 2] µg/L
- INR minimum: [1 - 3.5]
- INR maximum: [3.5 - 5]

5) Fonction rénale (DFG estimé, protéinurie)

- Baisse du DFG estimé : 30 %
- Augmentation de sérum créatinine : 50 %
- Protéinurie *de novo*

Les valeurs maximales pour chaque paramètre sont :

- Baisse du DFG estimé : 9999.99%
- Augmentation de sérum créatinine : 9999.99%

6) Probabilité de survie du greffon rénale

- Baisse de la probabilité de survie à 3 ans : 1%
- Baisse de la probabilité de survie à 5 ans : 1%
- Baisse de la probabilité de survie à 7 ans : 1%

Les paramètres que vous ne pouvez pas modifier sont :


- Protéinurie de novo
- Pression systolique pour l'hypertension (Grade 3)
- Pression diastolique pour l'hypertension (Grade 3)
- Perte de poids en un mois
- Perte de poids en six mois
- Baisse de la probabilité de survie à 3 ans
- Baisse de la probabilité de survie à 5 ans
- Baisse de la probabilité de survie à 7 ans

16.2.2 Paramétrage au niveau du service

Pour paramétrer les alertes du service, cliquez sur "Alertes" dans le menu principal de gauche, puis sur "Paramétrage d'alertes".

Alertes				
<input type="button" value="Paramétrage d'alertes"/>				
Nom	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Créé le
Sophie Q. Lanreau	68730	26 août 2020	25 août 2015	9 oct. 2020

Vous arrivez sur la page "Paramétrage d'alertes du service".

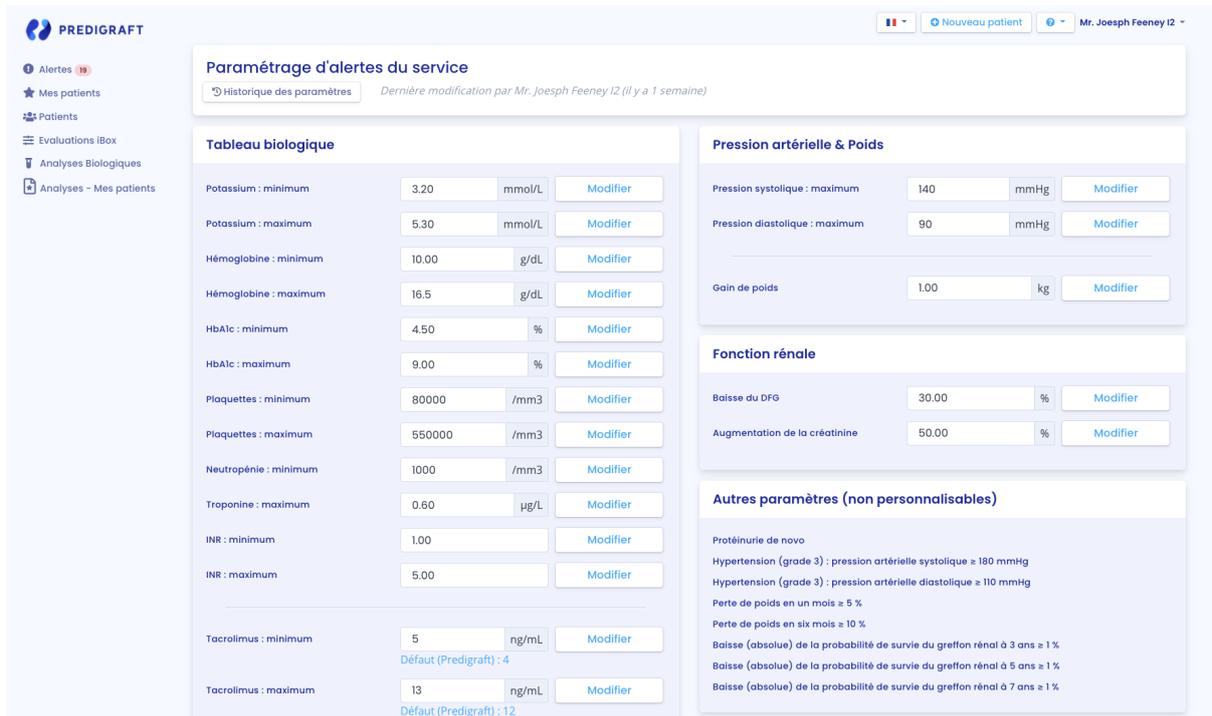

Paramétrage d'alertes du service
 Historique des paramètres Dernière modification par Mr. Joseph Feeney I2 (il y a 1 semaine)

Tableau biologique

Potassium : minimum	3.20	mmol/L	Modifier
Potassium : maximum	5.30	mmol/L	Modifier
Hémoglobine : minimum	10.00	g/dL	Modifier
Hémoglobine : maximum	16.5	g/dL	Modifier
HbA1c : minimum	4.50	%	Modifier
HbA1c : maximum	9.00	%	Modifier
Plaquettes : minimum	80000	/mm ³	Modifier
Plaquettes : maximum	550000	/mm ³	Modifier
Neutropénie : minimum	1000	/mm ³	Modifier
Troponine : maximum	0.60	µg/L	Modifier
INR : minimum	1.00		Modifier
INR : maximum	5.00		Modifier
Tacrolimus : minimum	5	ng/mL	Modifier
		Défaut (Predigraft) : 4	
Tacrolimus : maximum	13	ng/mL	Modifier
		Défaut (Predigraft) : 12	

Pression artérielle & Poids

Pression systolique : maximum	140	mmHg	Modifier
Pression diastolique : maximum	90	mmHg	Modifier
Gain de poids	1.00	kg	Modifier

Fonction rénale

Baisse du DFG	30.00	%	Modifier
Augmentation de la créatinine	50.00	%	Modifier


Autres paramètres (non personnalisables)

- Protéinurie de novo
- Hypertension (grade 3) : pression artérielle systolique \geq 180 mmHg
- Hypertension (grade 3) : pression artérielle diastolique \geq 110 mmHg
- Perte de poids en un mois \geq 5 %
- Perte de poids en six mois \geq 10 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 3 ans \geq 1 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 5 ans \geq 1 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 7 ans \geq 1 %

Pour modifier un paramètre : modifiez la valeur dans le champ correspondant puis cliquez sur le bouton « Modifier ». Une fenêtre de confirmation apparaît et contient les informations :

- La valeur de paramètre que vous avez renseigné,
- Le calcul qui génère l'alerte.

Exemple de modification du seuil de Tacrolimus minimum, au niveau du service :

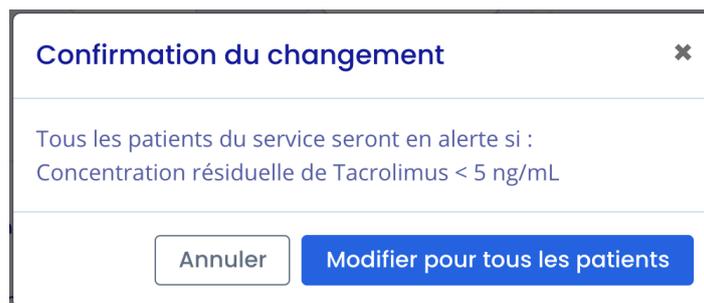

Confirmation du changement ✕

Tous les patients du service seront en alerte si :
 Concentration résiduelle de Tacrolimus < 5 ng/mL

Annuler Modifier pour tous les patients

Cliquez sur “Modifier pour tous les patients” pour valider ou sur “Annuler” pour que la mise à jour du paramètre ne soit pas effective.

Dès lors que vous avez mis à jour un paramètre, un bouton “Historique des paramètres” permet d'accéder à l'historique de modifications.

A côté du bouton d'historique, un message indique la date de la dernière mise à jour des paramètres ainsi que le nom de l'utilisateur qui a réalisé l'action.

Paramétrage d'alertes du service

🕒 Historique des paramètres
Dernière modification par Dr. John Smith (il y a 3 secondes)

Sous chaque paramètre qui n'a pas la valeur par défaut, un texte indique : « Défaut (Predigraft) : <valeur du paramètre de Predigraft> ».

Tacrolimus : minimum

ng/mL
Modifier

Défaut (Predigraft) : 4

16.2.3 Historique du paramétrage au niveau du service

Vous accédez à l'historique du paramétrage via le chemin "Alertes" sur le menu principal de gauche, "Paramétrage d'alertes du service", "Historique des paramètres".

Les historiques sont ordonnés de la plus récente à la plus ancienne. Dans l'historique vous visualiserez :

- Le nom de l'utilisateur qui a modifié les paramètres,
- La date du changement,
- La liste de chaque paramètre d'alerte et leur valeur.


Historique du paramétrage d'alertes du service ← Retour

Mr. Joesph Feeney l2 : il y a 1 semaine

<p>Tableau biologique</p> <p>Potassium (minimum) : 3.20 mmol/L Potassium (maximum) : 5.30 mmol/L Hémoglobine (minimum) : 10.00 g/dL Hémoglobine (maximum) : 16.5 g/dL HbA1c (minimum) : 4.50 % HbA1c (maximum) : 9.00 % Plaquettes (minimum) : 80000 /mm3 Plaquettes (maximum) : 550000 /mm3 Neutropénie (neutrophiles polynucléaires minimum) : 1000 /mm3 Troponine (maximum) : 0.60 µg/L INR (minimum) : 1.00 INR (maximum) : 5.00</p> <p>Tacrolimus (minimum) : 5 ng/mL Tacrolimus (maximum) : 13 ng/mL Ciclosporine T₂ (minimum) : 600 ng/mL Ciclosporine T₂ (maximum) : 1200 ng/mL Everolimus (minimum) : 12 ng/mL Everolimus (maximum) : 13 ng/mL Sirolimus (minimum) : 12 ng/mL Sirolimus (maximum) : 12 ng/mL</p>	<p>Fonction Rénale</p> <p>Baisse du DFG estimé : 30.00 % Augmentation de la créatinine : 50.00 % Protéinurie de novo</p> <p>Pression artérielle</p> <p>Pression systolique (maximum) : 140 mmHg Pression diastolique (maximum) : 90 mmHg Hypertension artérielle systolique (grade 3) : 180 mmHg Hypertension artérielle diastolique (grade 3) : 110 mmHg</p> <p>Poids</p> <p>Gain de poids : 1.00 kg Perte de poids en 1 mois : 5 % Perte de poids en 6 mois : 10 %</p> <p>Probabilité de Survie</p> <p>Baisse de la probabilité de survie du greffon rénal à 3 ans : 1.00 % Baisse de la probabilité de survie du greffon rénal à 5 ans : 1.00 % Baisse de la probabilité de survie du greffon rénal à 7 ans : 1.00 %</p>
--	--

16.2.4 Paramétrage au niveau d'un patient

Pour paramétrer les alertes d'un patient, accédez à la fiche patient et cliquez sur les trois petits points à côté du nom du patient, puis cliquez sur "Paramétrage d'alertes". Vous arrivez sur la page "Paramétrage d'alertes : <nom complet du patient>".

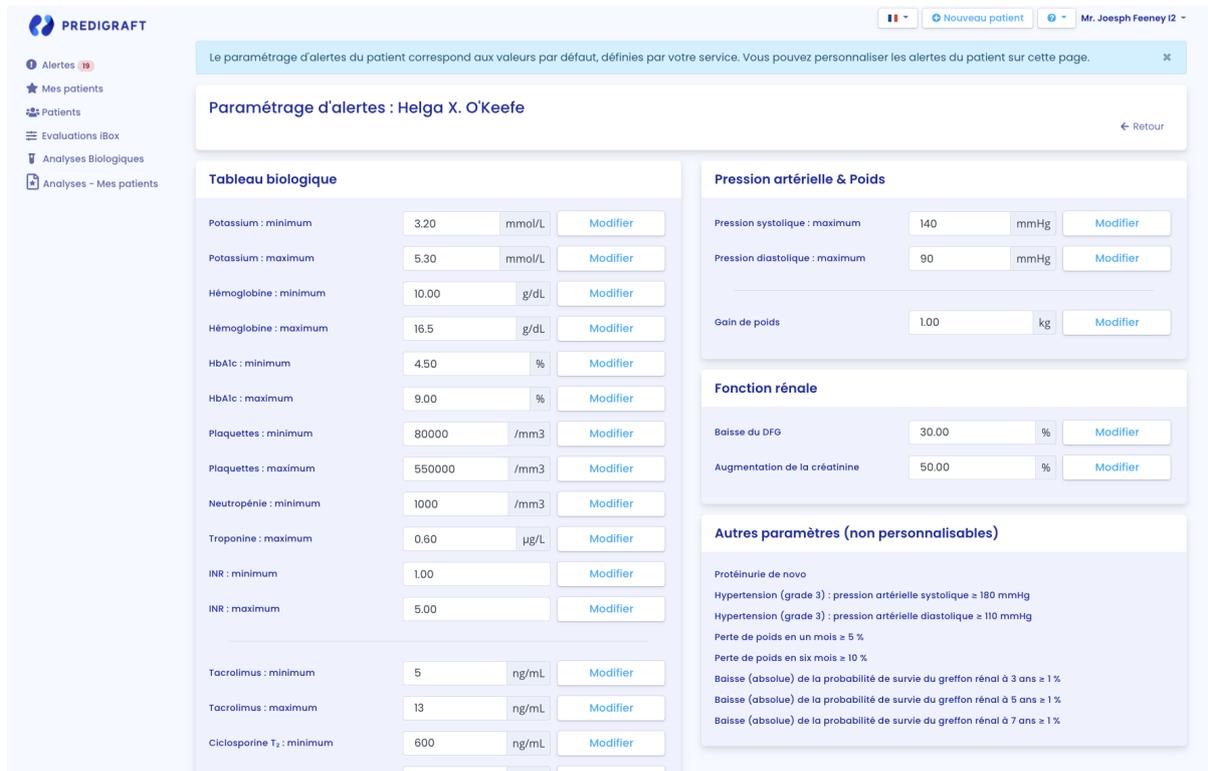

Le paramétrage d'alertes du patient correspond aux valeurs par défaut, définies par votre service. Vous pouvez personnaliser les alertes du patient sur cette page.

Paramétrage d'alertes : Helga X. O'Keefe

← Retour

Tableau biologique		
Potassium : minimum	3.20	mmol/L
Potassium : maximum	5.30	mmol/L
Hémoglobine : minimum	10.00	g/dL
Hémoglobine : maximum	16.5	g/dL
HbA1c : minimum	4.50	%
HbA1c : maximum	9.00	%
Plaquettes : minimum	80000	/mm ³
Plaquettes : maximum	550000	/mm ³
Neutropénie : minimum	1000	/mm ³
Troponine : maximum	0.60	µg/L
INR : minimum	1.00	
INR : maximum	5.00	
Tacrolimus : minimum	5	ng/mL
Tacrolimus : maximum	13	ng/mL
Ciclosporine T ₂ : minimum	600	ng/mL

Pression artérielle & Poids		
Pression systolique : maximum	140	mmHg
Pression diastolique : maximum	90	mmHg
Gain de poids	1.00	kg

Fonction rénale		
Baisse du DFG	30.00	%
Augmentation de la créatinine	50.00	%

Autres paramètres (non personnalisables)

- Protéinurie de novo
- Hypertension (grade 3) : pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg
- Hypertension (grade 3) : pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg
- Perte de poids en un mois ≥ 5 %
- Perte de poids en six mois ≥ 10 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 3 ans ≥ 1 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 5 ans ≥ 1 %
- Baisse (absolue) de la probabilité de survie du greffon rénal à 7 ans ≥ 1 %

Pour modifier un paramètre : modifiez la valeur dans le champ correspondant puis cliquez sur le bouton « Modifier ». Une fenêtre de confirmation apparaît et contient les informations :

- La valeur de paramètre que vous avez renseigné,
- Le calcul qui génère l'alerte.

Cliquez sur « Modifier » pour <nom complet du patient> pour valider ou sur « Annuler » pour que la mise à jour du paramètre ne soit pas effective.

Exemple de modification du seuil de Pression systolique maximum, au niveau du patient :

Confirmation du changement ✕

Le patient Sophie Q. Lanreau sera en alerte si :
Pression artérielle systolique > 130 mmHg

Annuler
Modifier pour Sophie Q. Lanreau

Dès lors que vous avez mis à jour un paramètre d’alerte au niveau du patient, un bouton « Historique des paramètres » permet d’accéder à l’historique de modification. Le bouton n’apparaît pas si vous avez modifié le paramétrage uniquement au niveau du service.

A côté du bouton d’historique, un message indique la date de la dernière mise à jour des paramètres d’alertes du patient ainsi que le nom de l’utilisateur qui a réalisé l’action.

Paramétrage d’alertes : Sophie Q. Lanreau

🕒 Historique des paramètres
Dernière modification par Dr. John Smith (il y a 1 minute)

Sous chaque paramètre qui n’a pas la valeur par défaut, un texte indique : « Défaut (Service) : <valeur du paramétrage du service> »

Pression systolique : maximum mmHg Modifier

Défaut (Service) : 140

16.2.5 Historique du paramétrage au niveau du patient

Pour accéder à l’historique des alertes d’un patient, sélectionnez la fiche d’un patient et cliquez sur les trois petits points à côté du nom du patient, puis cliquez sur “Historique des paramètres”.

L’historique est classé par modification la plus récente en haut de la page. L’historique est une liste contenant :

- Le champ d’application du paramétrage : service ou patient,
- Le nom de l’utilisateur qui a modifié les paramètres,
- La date du changement.

Historique d'alertes : Helga X. O'Keefe (069-71-9603) ← Retour

Alerte (13 janv. 2021) Mr. Joesph Feeney l2 a lu cette alerte il y a 16 secondes
13 janv. 2021 : Depuis la dernière date d'évaluation (2 déc. 2020), une perte de poids a été observée (- 16.59 kg).

Alerte (8 févr. 2021) Mr. Joesph Feeney l2 a lu cette alerte il y a 12 secondes
2 févr. 2021 : L'hémoglobine est supérieure au seuil défini : 12.7 g/dL.

Alerte (8 févr. 2021) Mr. Joesph Feeney l2 a lu cette alerte il y a 10 secondes
2 févr. 2021 : Les plaquettes sont supérieures au seuil défini : 323000 /mm3.

Alerte (16 févr. 2021) Mr. Joesph Feeney l2 a lu cette alerte il y a 10 secondes
La fonction rénale a diminué (augmentation de la créatinine) entre le 5 sept. 2019 et le 2 févr. 2021.

© 2021 Cibiltech

16.3 Calcul d'alerte pour un patient

Les alertes sont basées sur les informations suivantes. Les calculs d'alertes sont disponibles en Annexe.

1) Pression artérielle

Le logiciel calcule les alertes de pression artérielle à partir de :

- la date la plus récente de pression artérielle et les valeurs de pression systolique et diastolique associées

2) Poids

Le logiciel calcule les alertes de Poids à partir de :

- la date la plus récente de poids et la valeur associée
- la précédente date de poids et la valeur associée

3) Médicaments immunosuppresseurs

Le logiciel calcule les alertes de médicaments immunosuppresseurs lors de la première validation des données extraites d'un rapport biologique, si ce rapport est la date d'analyse la plus récente :

- date de l'analyse biologique
- valeurs de T₀ Tacrolimus (ng/mL), T₂ Ciclosporine (ng/mL), T₀ Everolimus (ng/mL), T₀ Sirolimus (ng/mL)

4) Données biologiques sanguines

Le logiciel calcule les alertes de données biologiques sanguines lors de la première validation des données extraites d'un rapport biologique, si ce rapport est la date d'analyse la plus récente :

- date de l'analyse biologique,
- valeur de Potassium convertie en mmol/L,
- valeur de l'Hémoglobine convertie en g/dL,
- valeur de l'HbA1c (Hémoglobine glyquée) convertie en %,
- valeur de la numération de Plaquettes convertie en /mm3,

- valeur de la numération de Polynucléaire neutrophiles convertie en /mm³,
- valeur de Troponine convertie en µg/L
- valeur de INR

5) Fonction rénale

Le logiciel calcule les alertes de fonction rénale à partir de deux rapports Predigraft :

- Ordonne les rapports Predigraft par date d'évaluation (date de l'étape 2) DFG estimé)
- Sélectionne le rapport le plus récent : "rapport en cours"
- Sélectionne le précédent rapport : "rapport précédent"

Le logiciel sélectionne dans les deux rapports : date de DFG estimé, valeur de DFG, valeur de créatinine si renseigné, date de protéinurie, valeur de protéinurie.

6) Probabilité de survie du greffon rénale

Le logiciel calcule les alertes de fonction rénale à partir de deux rapports Predigraft :

- Ordonne les rapports Predigraft par date d'évaluation (date de l'étape 2) DFG estimé)
- Sélectionne le rapport le plus récent : "rapport actuel"
- Sélectionne le précédent rapport : "rapport précédent"

Le logiciel sélectionne dans les deux rapports : probabilités de survie projetée à 3 ans, 5 ans, 7 ans.

16.4 Gestion de la liste des patients en alerte

Cliquez sur "Alertes" dans le menu principal de gauche pour obtenir la liste des patients en alertes.



Un compteur de patients en alertes ¹ est présent dans le menu. Si le compteur n'est pas visible, il n'y a aucun patient en alerte.

Alertes				
<input type="button" value="Paramétrage d'alertes"/>				
Nom	ID	Dernière évaluation	Date de transplantation	Créé le
Sophie Q. Lanreau	68730	26 août 2020	25 août 2015	9 oct. 2020

La liste des patients en alerte contient :

- Nom complet du patient,
- ID du patient,
- Dernière date d'évaluation : dernière date de l'étape "DFG estimé" de la création d'une évaluation iBox pour ce patient.
- Date de transplantation du patient
- Date de création de la fiche patient

Vous pouvez cliquer sur une des lignes de la liste de patients en alerte pour accéder à la fiche patient correspondante.

16.5 Gestion d'une alerte

Si un patient est en alerte, les alertes sont visibles depuis la fiche patient.



Chaque alerte contient :

- La date de création de l'alerte
- Le détail de l'alerte
- Un bouton "marquer comme lu"

Marquer comme lu

Si vous cliquez sur "Marquer comme lu", cette action est enregistrée en base de données et signifie que vous avez pris en compte l'alerte. Le bouton est changé en "Lu à <date et heure> par <utilisateur>" et ce message est visible par tous les membres du service.

Une alerte marquée comme lue est déplacée dans la page d'historique d'alertes, accessible par le bouton "Historique d'alertes" de la page patient.

Historique d'alertes

La page historique d'alertes liste les alertes d'un patient en les classant par la plus récente en premier. La page historique liste les alertes lues (en gris) et les alertes non lues (en rouge). Vous pouvez lire une alerte depuis cette page.

16.6 Notification quotidienne de l'activité de vos patients

Si vous êtes membre d'une équipe, chaque jour vous recevez un mail sur l'activité Predigraft de vos patients présents dans la liste « Mes patients ». Ce mail contient les informations suivantes :

- Le nombre de vos patients présents dans la liste « Mes patients » qui ont une alerte de poids ou de pression artérielle,

- Le nombre de documents importés par vos patients, présents dans la liste « Mes patients », le jour précédent,
- Le nombre de conversation non lues à ce jour avec vos patients présents dans la liste « Mes patients ».

Notes : Les données cliniques et biologiques ainsi que les documents ne sont pas contenues dans le mail.

Si vous êtes propriétaire d'une équipe, chaque jour vous recevez un mail sur l'activité Predigraft de l'ensemble des patients de votre service. Ce mail contient les informations suivantes :

- Le nombre de vos patients présents dans la liste « Mes patients » qui ont une alerte sur leur poids ou leur pression artérielle,
- Le nombre de patients ne figurant dans la liste "Mes patients" d'aucun membre de votre équipe et qui ont des alertes sur leur poids et leur tension artérielle,
- Le nombre de documents importés par vos patients, présents dans la liste « Mes patients », le jour précédent,
- Le nombre de documents importés par des patients ne figurant dans la liste "Mes patients" d'aucun membre de votre équipe,
- Le nombre de conversations non lues à ce jour avec vos patients présents dans la liste « Mes patients »,
- Le nombre de conversations non lues à ce jour avec les patients ne figurant dans la liste "Mes patients" d'aucun membre de l'équipe.

Notes : Les données cliniques et biologiques ainsi que les documents ne sont pas contenues dans le mail.

17. Application patient

À partir de l'application patient, le patient peut vous envoyer des données cliniques et biologiques :

- Poids,
- Pression artérielle,
- Rapport d'analyse biologique.

Vous pouvez directement consulter les données envoyées par le patient dans sa fiche patient correspondante.

18. Support/Maintenance

Pour toutes questions, demandes ou déclarations d'un dysfonctionnement, adressez un mail à support@Cibiltech.com.

MATÉRIOVIGILANCE : Tout incident ou risque d'incident grave (défini selon l'article L5212-2 du Code de la santé publique) détecté lors de l'utilisation du dispositif médical Predigraft doit être signalé au fabricant à l'adresse suivante : contact@cibiltech.com

Vous devez signaler tout événement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi : https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_vigilance_contact_points.pdf

19. Données personnelles

Pour toutes questions, demandes ou déclarations concernant vos données personnelles, veuillez-vous référer à la politique de confidentialité de Cibiltech. Elle est disponible en ligne sur le site de l'entreprise : www.cibiltech.com.

20. Annexes

21. 20.1 Annexe 1 : Paramètres d'entrée

1. Date de transplantation et d'évaluation

La date de transplantation doit être renseignée avec le jour, le mois et l'année.

La date d'évaluation est la date à laquelle la mesure de la créatinine a été effectuée. Cette date peut être différente de la date du rendez-vous médical. Cette date est utilisée comme référence pour toutes les autres mesures prises. Elle doit être complétée par le jour, le mois et l'année.

2. Le taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR)

Le taux de filtration glomérulaire (DFG) est la principale mesure de la fonction rénale. Il peut être mesuré ou estimé à partir de formules validées qui ont été publiées dans diverses revues. L'équation qui a été utilisée pour développer et valider l'iBox est celle utilisée dans l'étude Modification du régime alimentaire en cas de maladie rénale (MDRD) :

DFG estimé (mL/min/1,73 m²) = $186 \times (\text{Scr}/88,4)^{-1,154} \times (\text{Age})^{-0,203} \times (0,742 \text{ si femme})$ (Unité du système international)

3. Protéinurie

La protéinurie est un marqueur des lésions rénales. Elle peut être vérifiée à l'aide d'une bandelette urinaire. En cas de positivité, elle est confirmée et quantifiée sur des urines de 24 heures (résultat en mg/24h), ou lorsque la collecte d'urine de 24 heures n'est pas possible, sur un échantillon d'urine prélevé à tout moment de la journée et par le rapport protéinurie/créatinurie (résultat en mg/g ou mg/mmol).

La protéinurie est mesurée le même jour que la créatinine. Un délai de 15 entre la mesure de la créatinine et l'estimation ou la mesure de la protéinurie est toléré.

4. L'anticorps anti-HLA spécifiquement dirigé contre le donneur.

La présence d'anticorps anti-HLA spécifiques au donneur (DSA) est évaluée régulièrement après une transplantation de rein. La mesure est effectuée par analyse en phase solide. La méthode de choix actuelle est la cytométrie de flux avec des microbilles fluorescentes. Le résultat est fourni par le laboratoire HLA. Il peut être qualitatif (positif ou négatif) ou quantitatif. La valeur moyenne de l'intensité de fluorescence (MFI) du DSA immunodominant (i.e. DSA avec la MFI la plus élevée) doit être reportée. La date du test DSA ne doit pas se situer à plus de 2 mois autour de la date d'évaluation.

5. Histologie

Une biopsie de greffe de rein fournit un rapport de pathologie. Ce rapport fournit une description histologique avec une conclusion diagnostique ainsi qu'une description semi-quantitative des lésions histologiques de base selon la classification de Banff. Le clinicien a le choix de saisir les diagnostics rapportés ou les scores histologiques de Banff. La date de la biopsie ne doit pas dépasser 2 mois à compter de la date de l'évaluation.

Les valeurs d'entrée sont à remplir en fonction du mode utilisé, comme résumé dans le tableau 1.

20.2 Annexe 2 : Calcul d'alertes

1) Pression artérielle

Le logiciel calcule les alertes de pression artérielle à partir de :

- la date la plus récente de pression artérielle et les valeurs de pression systolique et diastolique associées

La pression artérielle systolique est appelée "PAS" ci-après. La pression artérielle diastolique est appelée "PAD".

Calcul d'alertes :

IF PAS > blood_pressure__high_systolic: «Le <DATE>, la pression artérielle systolique est supérieure à la cible définie pour <NOM> <PRENOM> : <VALEUR DE PAS> mmHg. »

IF PAD > blood_pressure__high_diastolic: «Le <DATE>, la pression artérielle diastolique est supérieure à la cible définie pour <NOM> <PRENOM> : <VALEUR DE PAD> mmHg. »

IF PAS >= 180 OR PAD >= 110 : «Le <DATE>, une pression artérielle de grade 3 a été observée pour <NOM> <PRENOM> (<VALEUR DE PAS> / <VALEUR DE PAD> mmHg).»

2) Poids

Le logiciel calcule les alertes de Poids à partir de :

- la date la plus récente de poids et la valeur associée

- la précédente date de poids et la valeur associée

Calcul d'alertes :

IF Gain de poids >= Weight_gain_kg:

«<DATE RECENTE> : Depuis la dernière date d'évaluation (<DATE PRECEDENTE>), un changement de poids a été observé chez <NOM> <PRENOM> (+ <DIFFERENCE ENTRE LES POIDS> kg).»

ELSE IF

L'écart entre les dates correspond à un mois ou moins AND Perte de poids >=

Weight_loss_percentage_one_month_ago (5%)

OR

L'écart entre les dates correspond à un mois jusqu'à six mois AND Perte de poids >=

Weight_loss_percentage_six_months_ago (10%) :

«<DATE RECENTE> : Depuis la dernière date d'évaluation (<DATE PRECEDENTE>), une perte de poids a été observée chez <NOM> <PRENOM> (- <DIFFERENCE ENTRE LES POIDS> kg)»

3) Médicaments immunosuppresseurs

Le logiciel calcule les alertes de médicaments immunosuppresseurs lors de la première validation des données extraites d'un rapport biologique, si ce rapport est la date d'analyse la plus récente : date de l'analyse biologique et valeurs T₀ Tacrolimus, T₂ Ciclosporine, T₀ Everolimus, T₀ Sirolimus

Calcul d'alertes :

IF T₀ Tacrolimus < trough_levels_low_tacrolimus OR > trough_levels_high_tacrolimus: «<DATE> : La concentration résiduelle de tacrolimus est en dehors de la cible définie pour <NOM> <PRENOM> (T₀ : <VALEUR> ng/mL).»

IF T₂ Cyclosporine < trough_levels_low_cyclosporine OR > trough_levels_high_cyclosporine: «<DATE> : La concentration de ciclosporine 2 heures après la prise (T₂) est en dehors de la cible définie pour <NOM> <PRENOM> (T₂ : <VALEUR> ng/mL).»

IF T₀ Sirolimus < trough_levels_low_everolimus OR > trough_levels_high_everolimus: «<DATE> : La concentration résiduelle de sirolimus est en dehors de la cible définie pour <NOM> <PRENOM> (T₀ : <VALEUR> ng/mL).»

IF T₀ Everolimus < trough_levels_low_sirolimus OR > trough_levels_high_sirolimus: «<DATE> : La concentration résiduelle d'everolimus est en dehors de la cible définie pour <NOM> <PRENOM> (T₀ : <VALEUR> ng/mL).»

4) Données biologiques sanguines

Le logiciel calcule les alertes de données biologiques sanguines lors de la première validation des données extraites d'un rapport biologique, si ce rapport est la date d'analyse la plus récente :

- date de l'analyse biologique,

- valeur de Potassium convertie en mmol/L,
- valeur de l'Hémoglobine convertie en g/dL,
- valeur de l'HbA1c (Hémoglobine glyquée) convertie en %,
- valeur de la numération de Plaquettes convertie en /mm³,
- valeur de la numération de Polynucléaire neutrophiles convertie en /mm³,
- valeur de Troponine convertie en µg/l
- valeur de INR

Calcul d'alertes :

IF Potassium < bio__potassium__low__mmol_l OR > bio__potassium__high__mmol_l:

« <DATE>: Le potassium est inférieur/supérieur au seuil défini : <VALEUR> mmol/L. »

IF Hémoglobine < bio__hemoglobin__low__g_dl OR > bio__hemoglobin__high__g_dl:

« <DATE>: L'hémoglobine est inférieure/supérieure au seuil défini : <VALEUR> g/dL. »

IF HbA1c < bio__hab1c__low__percentage OR > bio__hab1c__high__percentage:

« <DATE>: L'hémoglobine glyquée est inférieure/supérieure au seuil défini : <VALEUR> %. »

IF Plaquettes < bio__platelets__low__per_mm3 OR > bio__platelets__high__per_mm3:

« <DATE>: Les plaquettes sont inférieures/supérieures au seuil défini : <VALEUR> /mm³. »

IF Polynucléaires neutrophiles < bio__neutropenia__low__per_mm3:

« <DATE>: Une neutropénie a été détectée : <VALEUR>/mm³. »

IF Troponine > bio__troponin__high__ug_l:

« <DATE>: La troponine est supérieure au seuil défini (<VALEUR> µg/L). »

IF INR < bio__inr__low OR > bio__inr__high:

« <DATE>: L'INR est inférieur/supérieur au seuil défini : <VALEUR>. »

5) Fonction rénale

Le logiciel calcule les alertes de fonction rénale à partir de deux rapports Predigraft :

- Ordonne les rapports Predigraft par date d'évaluation (date de l'étape 2) DFG estimé)
- Sélectionne le rapport le plus récent : "rapport en cours"
- Sélectionne le précédent rapport : "rapport précédent"

Le logiciel sélectionne dans les deux rapports : date de DFG estimé, valeur de DFG, valeur de créatinine si renseigné, date de protéinurie, valeur de protéinurie

Calcul d'alertes :

IF la valeur de DFG du rapport actuel est réduite de "kidney_function__egfr_reduction" ou de plus, comparé à la valeur de DFG du rapport précédent :

«La fonction rénale a diminué (diminution du DFG estimé) entre le <DATE DU PRECEDENT RAPPORT> et le <DATE DU RAPPORT ACTUEL>»

IF la valeur de serum creatinine du rapport actuel est augmentée de “kidney_function__serum_creatinine_increase” ou plus, comparé à la valeur de serum creatinine du rapport précédent :
«La fonction rénale a diminué (diminution de serum creatinine) entre le <DATE DU PRECEDENT RAPPORT> et le <DATE DU RAPPORT ACTUEL>.»

IF la valeur de protéinurie était à 0 dans le précédent rapport et est supérieure à 0 dans le rapport actuel :
«La fonction rénale a diminué (protéinurie de novo) entre le <DATE DU PRECEDENT RAPPORT> et le <DATE DU RAPPORT ACTUEL>.»

6) Probabilité de survie du greffon rénale

Le logiciel calcule les alertes de fonction rénale à partir de deux rapports Predigraft :

- Ordonne les rapports Predigraft par date d'évaluation (date de l'étape 2) DFG estimé)
- Sélectionne le rapport le plus récent : “rapport actuel”
- Sélectionne le précédent rapport : “rapport précédent”

Le logiciel sélectionne dans les deux rapports : probabilités de survie projetée à 3 ans, 5 ans, 7 ans.

Calcul d'alertes :

IF probabilité de survie à 3 ans du rapport actuel < probabilité de survie à 3 ans du rapport précédent avec une précision de survival_probability__3y_reduction (1%)

OR

Probabilité de survie à 5 ans du rapport actuel < probabilité de survie à 5 ans du rapport précédent avec une précision de survival_probability__5y_reduction (1%)

OR

Probabilité de survie à 7 ans du rapport actuel < probabilité de survie à 7 ans du rapport précédent avec une précision de survival_probability__7y_reduction (1%) :

«La probabilité de survie du greffon rénal a diminué entre le <DATE DU PRECEDENT RAPPORT> et le <DATE DU RAPPORT ACTUEL>.»

20.3 Annexe 3 : Unités de référence du tableau biologique

Les valeurs stockées dans Predigraft mais non affichées dans le tableau biologique sont représentées en italique.

Partie "Sang"

- Hémoglobine glyquée : %
- Glucose : mmol/L
- Sodium : mmol/L
- Potassium : mmol/L
- CO2 total : mmol/L
- Protéines : g/L
- Urée : mmol/L
- Créatinine : $\mu\text{mol/L}$
- eGFR : mL/min/1.73m²
- Calcium : mmol/L
- Phosphore : mmol/L
- Magnésium : mmol/L
- Acide urique : $\mu\text{mol/L}$
- Bilirubine totale : $\mu\text{mol/L}$
- Bilirubine conjuguée : $\mu\text{mol/L}$
- ALAT : UI/L
- ASAT : UI/L
- Phosphatase alcaline : UI/L
- Gamma GT : UI/L
- LDH : UI/L
- CPK : UI/L
- Amylase : UI/L
- Lipase : UI/L
- Cholestérol total : mmol/L
- HDL cholestérol total : mmol/L
- LDL cholestérol : mmol/L
- Triglycérides : mmol/L
- Troponine : ng/L
- Haptoglobine : g/L
- Ferritine : $\mu\text{g/L}$
- Coefficient saturée de transferrine : %
- PTH : ng/L
- 25-hydroxyvitamine D : ng/mL
- Di-hydroxyvitamine D : pg/mL
- Temps de prothrombine patient : secondes
- Temps de prothrombine contrôle : secondes
- TP : %
- INR (ratio)
- Ratio TCA
- TCA Patient : secondes
- TCA Contrôle : secondes
- Activité fibrinogène : g/L
- Anti-Xa : Xa/mL

- CRP : mg/L
- AB antibody assay : titre
- Hematies : $10^{12}/L$
- Hématocrite : %
- Hémoglobine : g/dL
- VGM : fL
- Réticulocytes : $10^9/L$
- Schizocytes : %
- Leucocytes : $10^9/L$
- Polynucléaires neutrophiles : $10^9/L$
- Polynucléaires éosinophiles : $10^9/L$
- Polynucléaires basophiles : $10^9/L$
- Lymphocytes : $10^9/L$
- Monocytes : $10^9/L$
- Plaquettes : $10^9/L$
- BK : copies log/mL
- CMV : copies log/mL
- VIH : copies log/mL
- VHB : copies log/mL
- VHC : copies log/mL
- Ciclosporine T0 : ng/mL
- Ciclosporine T2 : ng/mL
- Tacrolimus T0 : ng/mL
- Sirolimus T0 : ng/mL
- Everolimus T0 : ng/mL
- PSA : ng/mL

Partie "Urine"

- Volume d'urine : L/24h
- Protéines urinaires : g/L
- Rapport protéines-créatinine : g/g
- Urée : mmol/L
- Créatinine urinaire : mmol/L
- Sodium urinaire : mmol/L
- Potassium urinaire : mmol/L
- Hématies urinaires : / mm^3
- Leucocytes urinaires : / mm^3
- Microbiologie (texte)